

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tên sản phẩm: **Đầu kim cho bút tiêm**

Chủng loại: **Omnican® fine**

Mã sản phẩm: 929G12S-AP; 931G08S-AP; 931G06S-AP; 931G04S-AP

Mục đích sử dụng

Đầu kim **Omnican® fine** được thiết kế để sử dụng với hệ thống tiêm theo kim tiêm (NIS) tương thích để tiêm dưới da các sản phẩm thuốc dạng lỏng.

Chống chỉ định:

Không nên sử dụng thiết bị trên bệnh nhân nếu có khả năng có chống chỉ định đối với tiêm dưới da hoặc các lý do y tế khác cản trở việc sử dụng bút tiêm.

Biện pháp phòng ngừa:

Vui lòng sử dụng sản phẩm theo quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn tiêu chuẩn của quốc gia/tổ chức.

- Tham khảo ý kiến chuyên gia chăm sóc sức khỏe của quý vị để được hỗ trợ trong việc chọn chiều dài kim tiêm và kỹ thuật tiêm thích hợp.
- Không đóng lại nắp đầu kim sau khi đã tháo nắp ngoài.
- Không được sử dụng đầu kim nếu đã hết hạn.
- Vứt bỏ các đầu kim đã qua sử dụng trong thùng hủy kim theo hướng dẫn của quốc gia/tổ chức.

Cảnh báo:

- Không sử dụng nếu bao bì bị hở hoặc rách.
- Không được khử trùng lại.
- Chỉ dùng một lần. Không tái sử dụng hay dùng chung đầu kim.
- Tái sử dụng đầu kim dùng một lần sẽ tạo ra nguy cơ rủi ro cho bệnh nhân và người sử dụng. Việc tái sử dụng có thể gây nhiễm bẩn và/hoặc suy giảm tính năng của kim tiêm.
- Không lưu trữ đầu kim khi đã cố định trên hệ thống bút tiêm để tránh thương tích bất ngờ do kim đâm, liều lượng không chính xác do không khí đi vào ống, thuốc kết tinh hoặc rò rỉ.
- Nhiễm bẩn và/hoặc bị giới hạn chức năng của đầu kim có thể làm cho bệnh nhân bị thương tích, bệnh tật hay tử vong.

Hướng dẫn sử dụng:

1. Tháo bỏ giấy bên ngoài.
2. Lắp đầu kim vào hệ thống tiêm. Đảm bảo kim tiêm được giữ thẳng.
3. Siết chặt đầu kim trên hệ thống tiêm. Đảm bảo kim tiêm vừa khít.
4. Tháo bỏ nắp ngoài đầu kim.
5. Kéo nắp bảo vệ kim ra theo chiều thẳng đứng.

6. Kiểm tra tính năng của kim theo hướng dẫn sử dụng của bút tiêm.
7. Tiêm theo hướng dẫn hệ thống bút tiêm của bạn.
8. Hủy đầu kim ngay sau khi sử dụng trong thùng hủy kim thích hợp.
Tuân thủ theo quy trình chuẩn tại cơ sở của bạn hoặc áp dụng các quy định chuẩn về tiêu hủy dụng cụ sắc nhọn.

Sản phẩm sử dụng tại nhà:

Vui lòng không ra một quyết định nào liên quan đến vấn đề y khoa trước khi tham khảo ý kiến nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị.

Tính tương thích:

Đầu kim Omnican® fine tuân thủ theo tiêu chuẩn ISO 11608-2. Để biết tổng quan về tính tương thích, vui lòng xem thông tin trên hộp sản phẩm.

Loại khử trùng:

Ethylen oxit (EO). Để biết loại khử trùng, vui lòng xem bao bì chính.

Đơn vị bán hàng:

Hộp chứa 100 đầu kim.