

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tên sản phẩm: **Bơm tiêm**

Chủng loại: Original Perfusor® Syringes

Mục đích sử dụng/ Chỉ định

Bơm tiêm Original Perfusor® Syringe có thể được sử dụng cho nhiều chỉ định chung với máy bơm tiêm hoặc không:

- Truyền dịch trị liệu
- Tiêm trị liệu
- Dinh dưỡng trị liệu
- Điều trị đau
- Kiểm soát thuốc
- Pha thuốc

Chống chỉ định

Hiện chưa có chống chỉ định đối với sản phẩm

Cẩn trọng

Sử dụng sản phẩm theo quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn chuẩn của Bộ Y Tế và cơ sở khám chữa bệnh.

Áp dụng kỹ thuật vô khuẩn theo hướng dẫn của Bộ Y tế và cơ sở khám chữa bệnh cho sản phẩm kim hút hoặc kim lọc.

Loại bỏ kim theo hướng dẫn của Bộ Y Tế và cơ sở khám chữa bệnh.

Tồn thương do kim đâm với kim nhiễm khuẩn có thể gây các bệnh nhiễm trùng.

Cảnh báo

Không sử dụng nếu bao bì bị mở hoặc phá hủy.

Không tái vô khuẩn.

Chỉ sử dụng một lần.

Không tái sử dụng.

Nhiễm khuẩn và/hoặc giới hạn chức năng của thiết bị có thể dẫn tới chấn thương, bệnh, hoặc tử vong cho bệnh nhân.

Các bước sử dụng

Áp dụng kỹ thuật vô khuẩn. Sử dụng Original Perfusor® Syringes theo hướng dẫn sử dụng với máy bơm tiêm điện tương thích.

1. Lấy sản phẩm từ bao bì

2. Gắn kim hút hoặc kim lọc (phụ thuộc vào loại sản phẩm) an toàn vào bơm tiêm có khóa vặn xoắn

3. Giữ ống tiêm bằng một tay và cẩn thận tháo nắp khỏi kim theo một cách thẳng để tránh tiếp xúc với đầu kim sắc (tùy thuộc vào loại sản phẩm).

4. Thực hiện việc lấy thuốc vào bơm tiêm Original Perfusor[®] Syringes theo các thủ tục và thông tin đã được thiết lập để sử dụng thuốc.
5. Loại bỏ ngay kim đã qua sử dụng vào hộp chứa vật sắc nhọn đã được phê duyệt theo các quy trình tiêu chuẩn của cơ sở y tế và / hoặc theo các quy định hiện hành để xử lý chất thải sắc nhọn.
6. Kết nối bơm tiêm với đường tiêm truyền thích hợp.
7. Lắp bơm tiêm vào bơm tiêm truyền và bắt đầu ứng dụng theo hướng dẫn sử dụng bơm và thuốc