

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tên sản phẩm: Túi hậu môn nhân tạo hai mảnh Flexima 3S, loại kín

### CHỈ ĐỊNH

Túi hậu môn nhân tạo Flexima 3S hai mảnh, loại kín dùng để chứa chất thải từ lỗ mở đại tràng hoặc lỗ mở niệu quản ra da.

### HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

#### 1. Trước khi dán đế

Cắt đế bảo vệ da sao cho vừa với kích thước lỗ mở ra da (A) theo hướng dẫn và cắt rộng ra khoảng 2 đến 3 mm để tránh đế dán chèn lên lỗ mở.

#### 2. Chuẩn bị da

Lau nhẹ lỗ mở bằng nước ấm. Tránh sử dụng các chất sát khuẩn (như ete, cồn hoặc những chất khử trùng khác) vì sẽ làm giảm độ bám dính của đế. Sau đó chườm khô vùng da cần thận.

#### 3. Đặt đế dán

Tháo lớp giấy phủ. Đặt đế dán xung quanh lỗ mở sao cho 3 nút khóa của đế nằm ở phía trên đầu (B). Miết nhẹ đế dán để dính vào da.

#### 4. Gắn túi

Kiểm tra xem miệng xả của túi đã được đóng hay chưa. Tách túi bằng cách bóc tách nhẹ để cho khí lọt vào bên trong; Giữ cạnh bên của túi (C). Chèn ngàm, (đặt ở phía bên dưới của miệng xả, trên đế dán) vào khớp nằm ở phía cuối đế (tùy thuộc vào cách sử dụng sản phẩm) (D). Nối hai khớp nối lại với nhau bằng cách ấn chúng vào khớp theo chiều từ dưới lên (E1, E2) và ấn hết toàn bộ chu vi khớp nối (F). Có thể đặt ngón cái dưới vòng đế dán để giữ chặt hơn và tránh ấn trúng phải vùng bụng; việc này phải được tiến hành cẩn thận nhằm tránh làm thủng lớp phim mỏng nằm ở nền của đế dán (G). Hoàn tất việc gắn nối. Lắp đầu trên của túi lên nút khóa nằm trên đế tương ứng.

#### 5. Tháo túi


Tháo đầu trên của túi ra (I). Tách hai khớp nối bằng cách nhấc nhẹ đầu trên của túi theo chiều đi xuống (J1, J2). Nếu cần, lau sạch phần đế dán bằng vải hoặc khăn không có lông tơ.

#### 6. Sử dụng miếng dán bảo vệ bộ lọc

Trước khi tắm, che phủ bộ thoát khí khử mùi.

Để che bộ lọc, chỉ cần dán một lớp băng dính lên lỗ thoát khí (M).

> Bộ lọc nằm trên túi chứa.

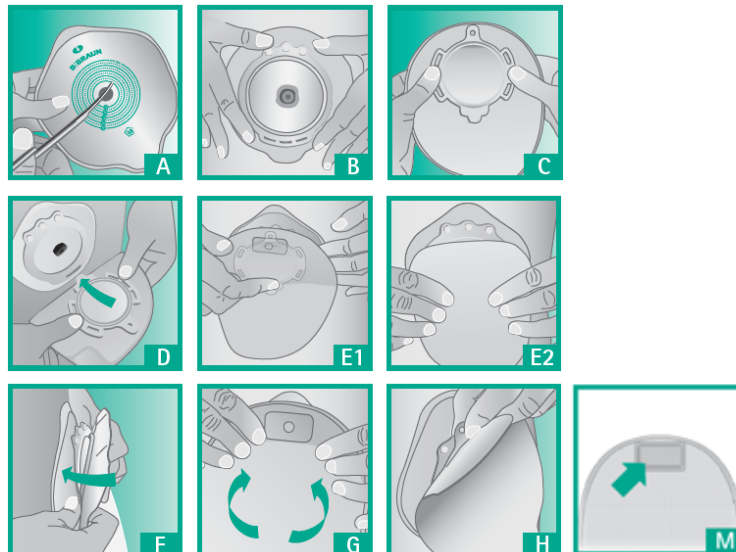

## **CHỐNG CHỈ ĐỊNH**

Không có bất kỳ chống chỉ định chính thức nào với FLEXIMA 3S. Là sản phẩm sử dụng một lần, FLEXIMA 3S không được tái sử dụng.

## **CẢNH BÁO/THẬN TRỌNG**

Việc tái sử dụng những dụng cụ dùng một lần có thể gây rủi ro tiềm ẩn đối với bệnh nhân.

Điều này sẽ gây nguy cơ nhiễm bẩn hoặc giảm tác dụng của dụng cụ.

Không có biện pháp đề phòng chính thức nào cho việc sử dụng dụng cụ y tế trên.