

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tên sản phẩm: **Khăn lau khử khuẩn thiết bị y tế mức độ thấp**

Chủng loại: Softa® Cloth CHX 2%

Mã sản phẩm: 19581

### Thành phần

Hộp chứa 100 túi, mỗi túi chứa 1 khăn thấm đủ dung dịch khử khuẩn hàm lượng: Isopropyl alcohol 70%, Chlorhexidine digluconate 2% (kt/tt)

### Chỉ định

Khử khuẩn bề mặt thiết bị y tế mức độ thấp.

Sản phẩm được sử dụng như bước cuối cùng của quy trình khử khuẩn trang thiết bị y tế; sau đó sẽ không khử khuẩn hoặc tiệt khuẩn trang thiết bị y tế.

### Hướng dẫn sử dụng

- Đeo khăn tay.
- Mở gói giấy, lấy khăn ra khỏi gói.
- Mở khăn lau ở kích cỡ cần dùng
- Đối với bề mặt nhìn thấy sạch bằng mắt thường, tiến hành khử khuẩn ngay, đảm bảo bề mặt ướt hoàn toàn trong 5 giây.
- Đối với bề mặt nhìn thấy nhiễm bẩn bằng mắt thường, quy trình phải được thực hiện theo 2 bước:
  - + Trước tiên, loại bỏ vết bẩn bằng khăn Softa Cloth CHX 2%.
  - + Sau đó, tiến hành khử khuẩn bằng một khăn Softa Cloth CHX 2% mới
- Để bề mặt được khô thêm 10 giây trước khi sử dụng. Không lau khô.
- Hủy miếng khăn đã dùng theo các chỉ dẫn của kiểm soát nhiễm khuẩn.

### Cảnh báo, thận trọng

Sản phẩm dễ cháy. Gây kích ứng mắt nghiêm trọng. Có thể gây buồn ngủ hoặc chóng mặt. Sản phẩm có thể gây hại cho đời sống thủy sinh với ảnh hưởng lâu dài. Tránh xa nguồn nhiệt, bề mặt nóng, tia lửa, ngọn lửa trần và các nguồn đánh lửa khác. Không hút thuốc. Mang găng tay/ quần áo bảo hộ/ bảo vệ mắt/ mặt nạ.

- Nếu hít phải: Đưa nạn nhân sang khu vực không khí trong lành và giữ cho nạn nhân dễ thở.

- Nếu nhiễm vào mắt: Rửa kỹ bằng nước sạch trong vài phút. Tháo bỏ kính áp tròng (nếu có) để dễ dàng tiến hành. Tiếp tục rửa. Gọi cho Trung tâm chống độc hoặc bác sỹ nếu bạn cảm thấy không khỏe.

Tránh xa tầm tay trẻ em.

### Bảo quản

Bảo quản ở nhiệt độ 5°C - 25°C.

### Hạn sử dụng

2 năm kể từ ngày sản xuất.

**Quy cách đóng gói**

Hộp 100 khăn (mã sản phẩm: 19581)

**Chủ sở hữu sản phẩm:** B. Braun Medical AG

Địa chỉ: Seesatz 17, 6204 Sempach, Thụy Sĩ

**Cơ sở sản xuất:** Nice-Pak International Limited

Địa chỉ: Aber Park, Aber Road, Flint, CH6 5EX, Anh