

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tên sản phẩm: Bơm tiêm nhựa có kim

Chủng loại: Omnifix®; Omnifix®-F

Chỉ định

Sử dụng trong pha chế, tiêm chích (bao gồm nhưng không hạn chế: dưới da, trong da, tĩnh mạch, ...), rút dịch.

Chống chỉ định

Hiện chưa có chống chỉ định đối với sản phẩm.

Cảnh báo

- Sử dụng ngay sau khi xé bao gói sản phẩm
- Sau khi sử dụng, vứt bỏ đúng cách và an toàn để tránh nguy cơ lây nhiễm.
- Xử lý cẩn thận để tránh kim đâm vào tay
- Không thay vỏ bọc sau khi sử dụng.

Thận trọng

- Không tiệt trùng lại hoặc tái sử dụng.
- Không sử dụng nếu bao gói hoặc sản phẩm đã bị hư hỏng hoặc bị ô nhiễm.

Hướng dẫn sử dụng

- Để mở bao gói sản phẩm: gỡ lớp bao bì trên của bao gói
- Cầm bơm kim tiêm bỏ nắp bảo vệ kim. Đưa kim vào hút, tránh đụng kim vào cổ ống thuốc
- Tay không chạm nòng của bơm tiêm.
- Kéo phần đuôi của bơm tiêm cho đến khi đạt được thể tích mong muốn. Sau đó ngắt kết nối khỏi lọ đựng dịch truyền. Lặp lại nhiều lần cho đến khi đạt các thể tích và liều lượng thích hợp.
- Đuôi khí hoàn toàn ra khỏi bơm tiêm trước khi tiến hành tiêm chích.
- Tiến hành loại bỏ đúng quy định sau khi đã hoàn tất kỹ thuật

Chú ý:

- Không để sản phẩm ở nơi có độ ẩm, nhiệt độ cao và tránh để trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời.
- Sản phẩm tiệt trùng, sử dụng một lần.
- Sản phẩm không độc, không có thuốc nhuộm, không chứa latex