

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tên sản phẩm: Băng gạc silicone mềm hỗ trợ lành vết thương nhanh

Chủng loại: Askina® SilNet

Mã sản phẩm: 5197503; 5197510; 5191803; 5191810; 5192305; 5192310; 5195703; 5195705; 5195710; 5197505; 5197500; 5191805; 5192303; 5191003; 5191005; 5191010.

1. MÔ TẢ SẢN PHẨM

Askina® SilNet là băng gạc mỏng, có lỗ nhỏ dạng mắt lưới, ít dính làm bằng vải không dệt, và phủ hai mặt bằng 1 lớp silicone mềm. Phần tiếp xúc với vết thương, Askina® SilNet sẽ để dịch tiết thoát ra và thấm vào lớp băng gạc thứ cấp, vì vậy ngăn ngừa dịch tiết lưu lại tại mép vết thương.

Lớp silicone mỏng rất ít dính nên giảm tối đa gây tổn thương khi thay băng.

Askina® SilNet không thấm hút dịch tiết vết thương.

2. CHỈ ĐỊNH

Băng gạc Askina® SilNet được sử dụng cho nhiều dạng vết thương, từ vết thương nông đến vết thương sâu, như là bỏng độ II, ghép da, chỗ lấy da ghép, vết thương sau phẫu thuật, rách da, trợt da, tổn thương tỷ đè từ giai đoạn I-IV, loét động tĩnh mạch, thần kinh để hỗ trợ lành vết thương nhanh.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Askina® SilNet không dùng cho

- Loét do nhiễm trùng như lao, giang mai, nhiễm nấm sâu
- Vết cắn hay bỏng độ III.
- Trong trường hợp nhiễm trùng với các triệu chứng viêm nhiễm (sốt, phù nề, mẩn đỏ, đau), hãy liên hệ với nhân viên y tế. Bắt đầu sử dụng lại Askina® SilNet khi vết thương đã trở lại bình thường.
- Ghép da tự thân mắt lưới, không sử dụng nhiều lực ép lên Askina® SilNet
- Sau khi ghép da cố định, nên lưu băng Askina® SilNet trong 5 ngày.

Không sử dụng Askina® SilNet nếu đóng gói bị hư hỏng hay đã mở ra.

4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Askina® SilNet sử dụng rất đơn giản, không cần kỹ năng đặc biệt hay thiết bị hỗ trợ. Có thể lưu băng Askina® SilNet trong vài ngày, cũng như để dịch tiết thấm ra dễ dàng ra qua lớp băng thứ cấp.

4.1 Làm sạch da

- a) Làm sạch vết thương bằng nước muối (0.9%) hoặc dung dịch làm sạch vết thương như Prontosan® và miếng gạc vô trùng
- b) Lau khô vùng da xung quanh vết thương

4.2 Đắp băng gạc

Chọn kích thước Askina® SilNet phù hợp sao cho che phủ hoàn toàn bề mặt vết thương, đảm bảo che phủ từ 2-3 cm từ mép vết thương. Askina® SilNet có thể cắt cho vừa vết thương, nếu cần thiết thì nên bỏ lớp màng bảo vệ trước.

Nếu cần thiết, với vết thương lớn thì cần thêm vài băng gạc nữa đắp chồng nhẹ lên để đảm bảo che phủ hết vết thương.

4.2.1 Bóc màng bao phim phía sau. Để tránh dính băng gạc Askina® SilNet nên sử dụng găng tay đã được làm ẩm. Đắp Askina® SilNet phủ lên vết thương và vuốt nhẹ. Băng gạc Askina® SilNet có thể sử dụng cả hai mặt.

4.2.2 Đắp lớp băng gạc thứ cấp (ví dụ như Askina® Foam), tùy thuộc dịch tiết.

4.2.3 Cố định bằng băng dán hợp lý

4.3 Thay băng

Có thể lưu băng Askina® SilNet trong vài ngày đến một tuần, tùy thuộc vào tình trạng vết thương.

4.3.1 Gỡ bỏ băng gạc cố định hay thứ cấp

4.3.2 Ấn nhẹ vào vùng da xung quanh và gỡ cẩn thận mép gạc từ từ và tháo bỏ băng gạc Tiếp theo làm theo hướng dẫn như mục 4.1 và 4.2 để đắp gạc mới.

Khi dịch thấm vào lớp băng gạc thứ cấp, hoặc cần phải thay băng thì nên thay lớp băng gạc trong suốt thứ cấp, vẫn lưu băng gạc Askina® SilNet.

Khi thay lớp băng gạc thứ cấp, kiểm tra băng gạc Askina® SilNet để đảm bảo các lỗ lưới không bị che lấp và dịch tiết có thể thấm vào lớp băng gạc thứ cấp.



ИМ15 = tiêu chuẩn an toàn Nga (Gost-R)

5. KÍCH THƯỚC HIỆN CÓ

Askina® SilNet có các kích thước như sau:

- 5 x 7,5 cm
- 10 x 7,5 cm
- 10 x 10 cm
- 10 x 18 cm
- 20 x 30 cm

Cảnh báo: Việc tái sử dụng các thiết bị chỉ dùng 1 lần sẽ dẫn đến nguy cơ cho người sử dụng hoặc bệnh nhân. Điều này có thể dẫn đến nguy cơ gây nhiễm, và/ hoặc làm hỏng các chức năng của thiết bị. Việc gây nhiễm và/ hoặc làm hạn chế các chức năng của thiết bị có thể gây ra cho bệnh nhân tổn thương, bệnh tật, hoặc tử vong.