

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TIẾNG ANH

Tên sản phẩm: Nút chặn kim luôn có cổng tiêm thuốc

Chủng loại: In-Stopper

Mã sản phẩm: 4238010

Mô tả sản phẩm

Nút chặn kim luôn an toàn IN-Stopper, dài 40 mm, có màng latex trên nắp dậy cho phép rút máu hoặc chích thuốc nhiều lần. Có khóa vặn xoắn giúp đóng đường truyền an toàn.

Chỉ định

Sử dụng để chặn kim luôn, tránh cho máu trào ra ngoài, có cổng chích thuốc để bơm thuốc.

Chống chỉ định

Hiện chưa có chống chỉ định đối với sản phẩm

Nguy cơ/ Cảnh báo

Tái sử dụng thiết bị sử dụng một lần gây nguy cơ cao cho bệnh nhân và người sử dụng. Nó có thể dẫn tới nhiễm khuẩn và/ hoặc suy giảm chức năng. Nhiễm khuẩn và/ hoặc giới hạn các chức năng của thiết bị có thể dẫn đến tổn thương, bệnh hoặc tử vong cho bệnh nhân.

Không sử dụng nếu bao bì bị phá hủy.

Không tái khử trùng.

Hướng dẫn sử dụng

Kết nối IN-Stopper vào đuôi kim luôn bằng đầu khóa Luer.

Sử dụng kỹ thuật vô khuẩn.

Bơm thuốc thông qua cổng bơm thuốc không chứa latex.