

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

### **Bộ dây truyền thuốc, hóa chất điều trị ung thư: Intrapur® Inline**

Bộ dây không có kim, có bộ lọc vi khuẩn 0.2  $\mu$  m có đầu khóa vặn xoắn (luer lock), bầu đếm giọt 2 ngăn (cứng-mềm), không có chất gây độc DEHP, không chứa PVC.

Bộ lọc sử dụng tối đa trong 24 giờ.

### **Chỉ định:**

Bộ dây truyền dịch Intrapur® Inline sử dụng để truyền thuốc, hóa chất ung thư. Bộ dây truyền dịch dùng trọng lực.

### **Vật liệu sử dụng:**


Acrylstyrene polybutadiene, Supor®, polyester, polytetrafluoroethylene, polyethylene, polypropylene, polyamide, polystyrene, polystyrene chịu va đập, acrylnitrite-butadiene-styrenecopolymer, polyurethane.

### **Chống chỉ định:**

Sản phẩm được sử dụng theo hướng dẫn sử dụng. Dung dịch được đi qua màng lọc không phải là máu, chế phẩm máu, nhân tố đông máu, nhũ tương, nhũ dịch béo (như: chất béo hoặc thuốc), những chất này không hòa tan trong dung môi. Màng lọc không được dùng để làm vô trùng những chất hoặc vi khuẩn nhìn thấy được có trong dung dịch truyền.

### **Cách sử dụng:**

Hình ảnh mô tả các bước sử dụng bộ dây truyền dịch Intrafix® Primeline

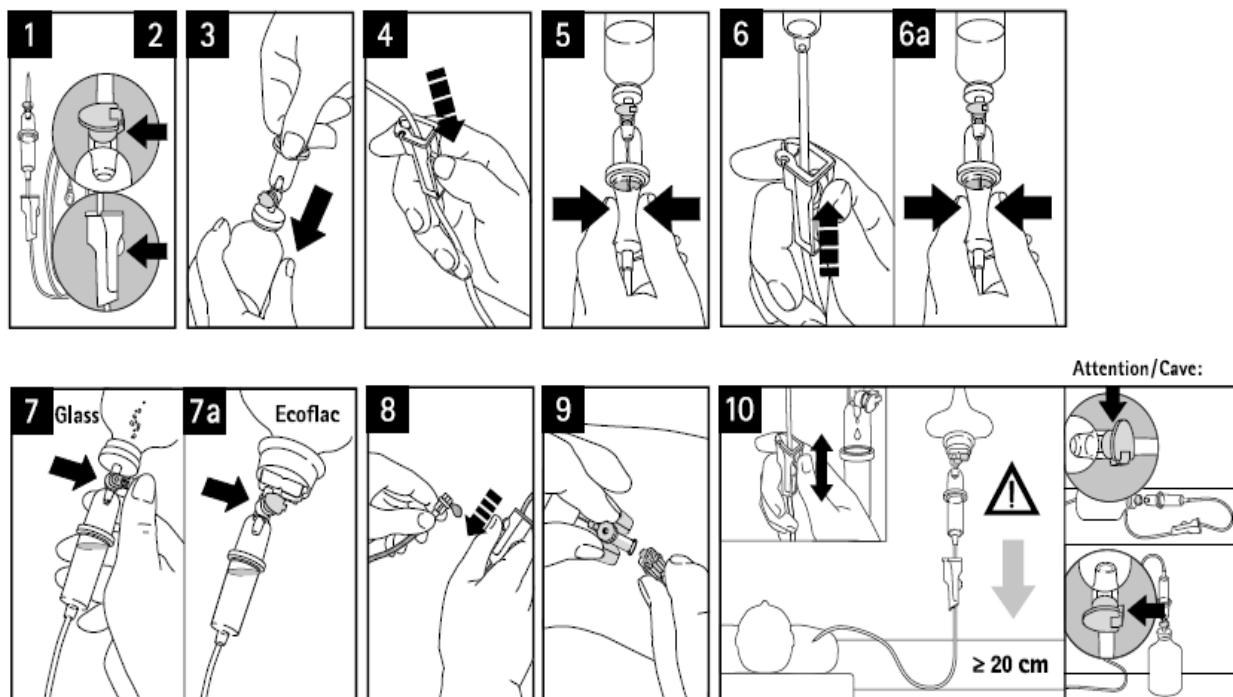

### **Các bước sử dụng:**

- 1-2: Kiểm tra van thông khí và khóa chỉnh giọt
- 3: Đâm đầu nhọn của dây truyền dịch vào chai dịch truyền theo 1 phương vuông góc 90 độ
- 4: Đóng khóa chỉnh giọt
- 5: Mồi 1 lượng dịch vào bầu đếm giọt
- 6: Mở khóa chỉnh giọt
- 6a: Mồi dịch tiếp tục đến 3/4 bầu đếm giọt
- 7: Mở van thông khí nếu chai dịch truyền làm bằng thủy tinh
- 7a: Đóng van thông khí nếu chai dịch truyền là chai nhựa tự xẹp đều
- 8: Đóng khóa chỉnh giọt khi đuổi hết khí ra khỏi dây truyền dịch
- 9: Kết nối đầu dây truyền dịch với kim lùn
- 10: Điều chỉnh khóa chỉnh giọt theo tốc độ truyền được ghi trong y lệnh

### **Cảnh báo:**

- Tái sử dụng thiết bị dùng một lần duy nhất sẽ gây nguy cơ tiềm ẩn cho bệnh nhân hoặc người sử dụng. Việc này có thể dẫn đến nhiễm bẩn và/hoặc hư hỏng chức năng hoạt động. Sự nhiễm bẩn và/hoặc hạn chế chức năng của thiết bị có thể khiến bệnh nhân bị tổn thương, đau ốm hoặc tử vong.
- Không tiệt khuẩn lại
- Không sử dụng nếu vỏ bao bì bị hư hỏng.
- Không sử dụng với máy truyền dịch.

### **Lưu ý:**

Bộ lọc phải treo thẳng đứng khi bắt đầu cho dịch chảy. Bộ lọc sẽ tự động được mồi dịch ở vị trí thẳng đứng. Không đảo ngược để làm sạch bộ lọc.