

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

**Tên sản phẩm:** Dây nối bơm tiêm điện

**Chủng loại:** Original Perfusor® Line

## **Chỉ định**

Dùng trong truyền dịch bằng máy bơm tiêm điện tự động.

## **Chống chỉ định**

Hiện chưa có chống chỉ định đối với sản phẩm.

## **Cảnh báo**

- Sử dụng ngay sau khi xé bao gói sản phẩm
- Sau khi sử dụng, vứt bỏ đúng cách và an toàn để tránh nguy cơ lây nhiễm.
- Không thay vỏ bọc sau khi sử dụng.

## **Thận trọng**

- Không tiệt trùng lại hoặc tái sử dụng.
- Không sử dụng nếu bao gói hoặc sản phẩm đã bị hư hỏng hoặc bị ô nhiễm.

## **Hướng dẫn sử dụng**

- Để mở bao gói sản phẩm: gỡ lớp bao bì trên của bao gói.
- Kết nối đầu dây vào bơm tiêm đã chuẩn bị sẵn.
- Kiểm tra tính chắc chắn của kết nối.
- Tiến hành đuổi khí ra khỏi dây nối trước khi lắp vào đường truyền.
- Kết nối đầu còn lại vào cổng đường truyền đến bệnh nhân.

## **Chú ý:**

- Không để sản phẩm ở nơi có độ ẩm, nhiệt độ cao và tránh để trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời.
- Sản phẩm tiệt trùng, sử dụng một lần
- Sản phẩm không độc, không có thuốc nhuộm, không chứa latex