

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Chỉ phẫu thuật nâng mô

Chủng loại: Surgical Loop

Mô tả

Chỉ phẫu thuật nâng mô (chủng loại Surgical Loop) là một bộ dụng cụ đặc biệt dùng trong phẫu thuật giúp bóc tách, đánh dấu, nâng đỡ cơ học và buộc thắt các cơ quan, mạch máu, gân và dây thần kinh.

Chỉ phẫu thuật nâng mô (chủng loại Surgical Loop) là một loại băng buộc rút có nguồn gốc từ SILICONE (không phủ), lưới POLYESTER hoặc lưới COTTON (phủ).

Chỉ phẫu thuật nâng mô (chủng loại Surgical Loop) được cung cấp với nhiều màu để tăng khả năng nhận biết.

Chỉ phẫu thuật nâng mô (chủng loại Surgical Loop) được tiệt trùng với ethylene oxide và là sản phẩm dùng một lần.

Chỉ định

- Để buộc thắt và nâng đỡ cơ học các cơ quan.
- Để bóc tách và buộc thắt các mạch máu, gân và dây thần kinh.
- Để đánh dấu mô

Cơ chế hoạt động

Sử dụng chỉ phẫu thuật nâng mô (chủng loại Surgical Loop) để bóc tách, đánh dấu, buộc thắt và nâng đỡ cơ học các mô giúp quang trường phẫu thuật trở nên rõ ràng hơn. Các biện pháp này giúp đơn giản hóa một cách đáng kể các thủ thuật phẫu thuật.

Chống chỉ định

Không.

Các biện pháp phòng ngừa khi sử dụng

Không.

Tương tác với tác nhân khác

Không ghi nhận.

Cảnh báo

Không để lại chỉ phẫu thuật nâng mô (chủng loại Surgical Loop) trong cơ thể bệnh nhân!

Không tái sử dụng sản phẩm: Nguy cơ nhiễm trùng cho bệnh nhân và/hoặc người sử dụng và sự suy giảm chức năng của sản phẩm gây ra do tái sử dụng. Nguy cơ chấn thương, bị bệnh hoặc tử vong do nhiễm bẩn và/hoặc suy giảm chức năng của sản phẩm.

Không yêu cầu các điều kiện bảo quản đặc biệt.

Cách sử dụng

Trước khi sử dụng chỉ phẫu thuật nâng mô (chủng loại Surgical Loop), người dùng phải có kinh nghiệm phẫu thuật, hiểu rõ cách sử dụng và các đặc tính của bộ dụng cụ đặc biệt. Phải sử dụng chỉ phẫu thuật nâng mô (chủng loại Surgical Loop) tuân thủ theo các yêu cầu phẫu thuật. Phải loại bỏ chỉ phẫu thuật nâng mô (chủng loại Surgical Loop) sau phẫu thuật.

Tác dụng phụ

Không ghi nhận.

Thông tin liên quan tới thời hạn bảo quản

Không được sử dụng chỉ phẫu thuật nâng mô (chủng loại Surgical Loop) khi đã hết hạn. Bao bì đã mở mà chưa sử dụng phải được tiêu hủy.

Thông tin khác

Chỉ được sử dụng chỉ phẫu thuật nâng mô (chủng loại Surgical Loop) một lần và không được tái tiệt trùng!

Ngày thông tin: 03/2011