

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tên sản phẩm: Nút chặn kim luân và xy lanh

Chủng loại: Combi-Stopper

Mô tả sản phẩm

Nút chặn kim luân và xy lanh Combi-Stopper. Có 2 đầu khóa.

Chỉ định

Sử dụng để chặn kim luân, đóng đầu xy lanh, các loại van một chiều.

Chống chỉ định

Hiện chưa có chống chỉ định đối với sản phẩm.

Nguy cơ/ Cảnh báo

Tái sử dụng thiết bị sử dụng một lần gây nguy cơ cao cho bệnh nhân và người sử dụng. Nó có thể dẫn tới nhiễm khuẩn và/ hoặc suy giảm chức năng. Nhiễm khuẩn và/ hoặc giới hạn các chức năng của thiết bị có thể dẫn đến tổn thương, bệnh hoặc tử vong cho bệnh nhân.

Không sử dụng nếu bao bì bị phá hủy.

Không tái khử trùng.

Hướng dẫn sử dụng

Sử dụng kỹ thuật vô khuẩn.

Kết nối Combi-Stopper vào kim luân hay xy lanh bằng đầu khóa thích hợp.