

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Chỉ phẫu thuật Supramid

Mô tả

Supramid là chỉ khâu vô trùng, không tiêu dùng trong phẫu thuật. Chỉ Supramid kích thước USP 5/0 và mỏng hơn chỉ đơn, được làm từ polyamide 6. Chỉ dày hơn USP 5/0 bao gồm lõi (chỉ đơn xoắn lại) bằng Polyamide 6.6 không nhuộm và vỏ ngoài bằng polyamide 6 không nhuộm (Supramid trắng) hoặc nhuộm màu đen (Palamid® đen 00-6005).

Chỉ khâu Supramid đáp ứng các yêu cầu của Ph. Eur. về chỉ khâu vô trùng, không tiêu.

Chỉ định

Supramid được chỉ định cho khâu da và phẫu thuật tạo hình.

Cơ chế hoạt động

Supramid gây ra phản ứng viêm cấp tính không đáng kể tại các mô, sau đó mô liên kết dạng sợi sẽ dần dần bao bọc chỉ khâu.

Giống như tất cả các loại chỉ khâu polyamide khác, Supramid *trong cơ thể* sẽ mất dần độ bền trong thời gian dài do hoạt động của enzym nội sinh.

Chống chỉ định

Supramid được chống chỉ định khi sử dụng chỉ khâu để chống đỡ lâu dài.

Cảnh báo

Không tái khử trùng Supramid. Bao bì đã mở mà chưa sử dụng phải được tiêu hủy.

Không tái sử dụng sản phẩm: Nguy cơ nhiễm trùng cho bệnh nhân và/hoặc người sử dụng và sự suy giảm chức năng của sản phẩm gây ra do tái sử dụng. Nguy cơ chấn thương, bị bệnh hoặc tử vong do nhiễm bẩn và/hoặc suy giảm chức năng của sản phẩm.

Không yêu cầu các điều kiện bảo quản đặc biệt.

Lưu ý/Các biện pháp phòng ngừa

Cần đặc biệt thận trọng khi thao tác với chỉ khâu để đảm bảo rằng việc sử dụng các dụng cụ phẫu thuật, như nhíp hay kẹp kim, không dẫn đến hư hỏng do kẹp và xoắn.

Người dùng chỉ khâu Supramid phải có kinh nghiệm với các kỹ thuật khâu trong phẫu thuật.

Áp dụng

Sử dụng theo các yêu cầu phẫu thuật.

Tác dụng phụ

Không ghi nhận phản ứng có hại xảy ra khi sử dụng chỉ khâu theo hướng dẫn.

Ngày thông tin: 03/2011