

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tên sản phẩm	Chủng loại	Mã sản phẩm
Bộ dây dẫn máu siêu lọc chậm liên tục sử dụng cho máy lọc máu liên tục	Diapact® CRRT Bloodlines (SCUF Kit)	7210351
Bộ dây dẫn máu cho liệu pháp thẩm tách/siêu lọc sử dụng cho máy lọc máu liên tục	Diapact® CRRT Bloodlines (HD/HF Kit)	7210349
Bộ dây dẫn máu cho liệu pháp tách huyết tương sử dụng cho máy lọc máu liên tục	Diapact® CRRT - Plasma Exchange Kit	7210348
Bộ dây dẫn máu cho liệu pháp hấp phụ huyết tương sử dụng cho máy lọc máu liên tục	Diapact CRRT-Plasma Adsorption Perfusion Kit	7210352

Tuân thủ các hướng dẫn sử dụng trong sổ tay này dành cho máy lọc máu liên tục (Diapact® CRRT).

### Chỉ định:

Sản phẩm này được dùng cho máy lọc máu liên tục (Diapact® CRRT) để thực hiện thẩm tách máu – lọc máu liên tục, siêu lọc chậm liên tục, liệu pháp tách huyết tương và hấp phụ huyết tương.

**Chống chỉ định:** Chưa rõ

### Cảnh báo và lưu ý:

- Sản phẩm này được thiết kế để sử dụng một lần và thời gian sử dụng không quá 72 giờ
- Thử nghiệm trên động vật cho thấy DEHP có khả năng gây hại đối với khả năng sinh sản. Theo trình độ kiến thức khoa học hiện tại, rủi ro (khi sử dụng lâu dài) đặc biệt đối với bé trai sinh non, là hoàn toàn có thể xảy ra. Để đề phòng, các chế phẩm y tế có chứa DEHP cần phải được sử dụng giới hạn trong thời gian ngắn đối với phụ nữ mang thai, bà mẹ đang cho con bú, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

### Khử trùng và thời hạn sử dụng

Sản phẩm được khử trùng bằng ETO và thời hạn sử dụng là 5 năm.

Sản phẩm này vô trùng và không chứa chất gây sốt. Không sử dụng nếu bao bì đã bị hư hỏng.

### Hướng dẫn sử dụng

- Lấy dây máu ra khỏi bao bì và lắp vào máy lọc máu liên tục (Diapact® CRRT) tùy theo loại liệu pháp đã chọn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Hướng dẫn sử dụng máy Diapact® CRRT để xem hình ảnh lắp dây máu theo từng loại liệu pháp.
- Nối từng đầu nối dây máu vào túi đựng dung dịch NaCl 0,9%, túi thu dịch thải, túi dịch thẩm tách/dịch bù hoặc bộ lọc/bộ lọc máu cấp cứu.
- Mở vòng kẹp trên ống dẫn chính và đóng vòng kẹp trên ống dẫn phụ, sau đó khởi động quy trình mỗi dịch và liệu pháp theo hướng dẫn trên màn hình máy Diapact® CRRT.

**Điều kiện bảo quản:** Sản phẩm phải được bảo quản trong bao bì gốc trong phòng có nhiệt độ 0-30°C và tránh ánh nắng trực tiếp.

## Giải thích các ký hiệu



Mã	Số Lô	Ngày	Khử	Ngày	Chỉ	sử	Không sử dụng	Bảo
số		sản	trùng	Hết	dụng	một	nếu bao bì đã bị	quản ở
hàng		xuất	bằng	hạn	lần		hư hỏng	nhiệt độ
hóa			ETO					dưới
								30°C

**Nhà sản xuất** : B. Braun Avitum AG, Đức