

**CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM**  
**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CỦA SẢN PHẨM**

**Tên sản phẩm:** Bộ dây dẫn máu cho liệu pháp tách huyết tương sử dụng cho máy lọc máu liên tục  
**Chủng loại:** Diapact® CRRT Bloodlines  
**Mã sản phẩm:** 7210348

Tuân thủ các hướng dẫn sử dụng trong sổ tay này dành cho máy lọc máu liên tục (Diapact® CRRT).

**Chỉ định:**

Sản phẩm này được dùng cho máy lọc máu liên tục (Diapact® CRRT) để dẫn máu từ cơ thể tới và đi ra từ quả lọc trong thẩm tách máu, lọc máu và liệu pháp huyết tương trong lọc máu liên tục.

**Chống chỉ định:** Chưa phát hiện chống chỉ định nào khi sử dụng dây máu. Dây máu tách huyết tương chỉ sử dụng trên máy thiết kế riêng.

**Cảnh báo và thận trọng:**

1. Sản phẩm này được thiết kế để sử dụng một lần và thời gian sử dụng không quá 72 giờ  
2. Thử nghiệm trên động vật cho thấy DEHP có khả năng gây hại đối với khả năng sinh sản. Theo trình độ kiến thức khoa học hiện tại, rủi ro (khi sử dụng lâu dài) đặc biệt đối với bé trai sinh non, là hoàn toàn có thể xảy ra. Để đề phòng, các chế phẩm y tế có chứa DEHP cần phải được sử dụng giới hạn trong thời gian ngắn đối với phụ nữ mang thai, bà mẹ đang cho con bú, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Thiết bị thẩm tách được vận hành dưới sự hướng dẫn của bác sĩ điều trị nếu bệnh nhân có các trường hợp sau:

- Tuần hoàn không ổn định
- Hạ kali máu

**Tác dụng bất lợi có thể xảy ra:**

Chưa phát hiện tác dụng phụ nào khi sử dụng dây máu. Bệnh nhân bị quá mẫn với các thành phần cấu tạo của sản phẩm không được phép điều trị bằng sản phẩm này.

**Khử trùng và thời hạn sử dụng**

Sản phẩm được khử trùng bằng ethylenoxide và thời hạn sử dụng là 4 năm.








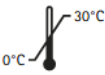
Sản phẩm này vô trùng và không chứa chất gây sốt. Không sử dụng nếu bao bì đã bị hư hỏng.

## Hướng dẫn sử dụng

1. Lấy dây máu ra khỏi bao bì và lắp vào máy lọc máu liên tục (Diapact® CRRT) tùy theo loại liệu pháp đã chọn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Hướng dẫn sử dụng máy Diapact® CRRT để xem hình ảnh lắp dây máu theo từng loại liệu pháp.
2. Nối từng đầu nối dây máu vào túi đựng dung dịch NaCl 0,9%, túi thu dịch thải, túi dịch thẩm tách/dịch bù hoặc bộ lọc/bộ lọc máu cấp cứu.
3. Mở vòng kẹp trên ống dẫn chính và đóng vòng kẹp trên ống dẫn phụ, sau đó khởi động quy trình môi dịch và liệu pháp theo hướng dẫn trên màn hình máy Diapact® CRRT.

**Điều kiện bảo quản:** Sản phẩm phải được bảo quản trong bao bì gốc trong phòng có nhiệt độ 0-30°C và tránh ánh nắng trực tiếp.

## Giải thích các ký hiệu

					
Mã số sản phẩm	Số lô	Ngày sản xuất	Khử trùng bằng ethylenoxide	Ngày hết hạn	Chỉ sử dụng một lần
					
Không sử dụng nếu bao bì đã bị hư hỏng	Bảo quản ở nhiệt độ từ 0°C-30°C				

**Hãng, nước sản xuất:** B. Braun Avitum Italy S.p.A., Italy

**Chủ sở hữu sản phẩm:** B. Braun Avitum AG, Đức