

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tên sản phẩm: Dung dịch làm sạch thiết bị y tế

Chủng loại: Helizyme

Thành phần

Nước tinh khiết, Propylene Glycol, Sokalan FT CP 10, Butyl Diglycol, Polyoxethylene (7) Undecyl Ether, Alkyl Ether Carboxylic Acid, **Enzyme protease** (Savinase® 16 LEX), Citric Acid, Tetrapolyphosphoric acid methyl ester, 1-Dodecyl Pyrrolidone-2-one, Benzotriazole, Methylparaben, Colour Patent Blue V, Triethanolamine.

Chỉ định

Helizyme được dùng để làm sạch các thiết bị y tế phẫu thuật, ống nội soi cứng và mềm. Để loại bỏ hiệu quả các màng hữu cơ, máu, dịch tiết, chất nhầy và các chất bẩn hữu cơ khác. Sản phẩm ít tạo bọt, thích hợp cho quá trình làm sạch thủ công và làm sạch bằng siêu âm.

Hướng dẫn sử dụng

Pha 1% sản phẩm trong nước ấm. Ngâm ngập hoàn toàn thiết bị y tế. Sử dụng dụng cụ rửa phù hợp. Thời gian ngâm thiết bị y tế thường là 5 phút, có thể dài hơn với chất bẩn khó tẩy hoặc đã bị khô.

Sau khi làm sạch bằng dung dịch Helizyme, rửa lại dụng cụ với nước và tiến hành quy trình khử khuẩn và tiệt khuẩn thiết bị y tế. Dung dịch ngâm rửa cần phải thay mới hằng ngày hoặc khi nhiễm bẩn thấy rõ. Tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất thiết bị y tế và thiết bị nội soi.

Để làm sạch dao kim cương, ngâm với dung dịch Helizyme 50% trong 30 phút trong bể siêu âm cài đặt ở 60°C.

Đặc biệt các ống nội soi mềm phải được làm sạch bằng bàn chải và bơm rửa với nước, ví dụ như dùng bơm tiêm.

Cảnh báo, thận trọng

Giữ ngoài tầm tay trẻ em.

Rửa tay trước khi mở và lập tức ngay khi dùng sản phẩm

Tránh tiếp xúc với da, mắt và quần áo. Khi bị tiếp xúc với mắt, rửa kỹ bằng nước sạch trong vài phút. Tháo bỏ kính áp tròng (nếu có) để dễ dàng tiến hành. Tiếp tục rửa. Gọi cho Trung tâm chống độc/ bác sĩ nếu cảm thấy không khỏe.

Sản phẩm là không sử dụng trên người.

Bảo quản

Bảo quản ở nhiệt độ từ 5 đến 25°C.

Quy cách đóng gói

Chai nhựa 1000ml (Mã sản phẩm: 19862); Can nhựa 5L (Mã sản phẩm: 19863)