

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Bộ dây truyền dịch có bầu để pha thuốc Dosifix®

Thiết bị truyền đặc biệt với bầu xi lanh chia vạch 150 ml. Van nổi trong bầu xi lanh chia vạch có tác dụng ngăn ngừa tắc mạch do bọt khí khi bầu xi lanh cạn hết nước. Bầu đếm giọt chứa bộ lọc 15 µm để lọc các hạt trong dung dịch truyền.

Chỉ định

Đề đồng chính xác các lượng nhỏ trong điều trị truyền dịch. Thiết bị được gắn một ống nhỏ giọt cực nhỏ, mỗi 60 giọt tương đương khoảng 1 ml nước cất.

Chống chỉ định

Không sử dụng trong truyền máu.

Nguy cơ

Chưa có biến chứng nào được phát hiện khi được sử dụng đúng cách.

Cảnh báo

Tái sử dụng thiết bị dùng một lần duy nhất sẽ gây nguy cơ tiềm ẩn cho bệnh nhân hoặc người sử dụng. Việc này có thể dẫn đến nhiễm bẩn và/hoặc hư hỏng chức năng hoạt động. Sự nhiễm bẩn và/hoặc hạn chế chức năng của thiết bị có thể khiến bệnh nhân bị tổn thương, đau ốm hoặc tử vong.


Đóng nắp van thông khí khi sử dụng chai dịch truyền tự xẹp. Khi sử dụng chai dịch truyền không tự xẹp hoặc thủy tinh, mở nắp van thông khí trong quá trình sử dụng. Đóng nắp van trong giai đoạn tạm ngừng truyền dịch.

Không sử dụng cho truyền máu.

Không sử dụng nếu bao bì đã mở hoặc bị hư hỏng.

Cần thận trọng khi đánh giá khả năng tương thích của Dosifix® với Bơm đếm giọt nhu động.

Cách sử dụng

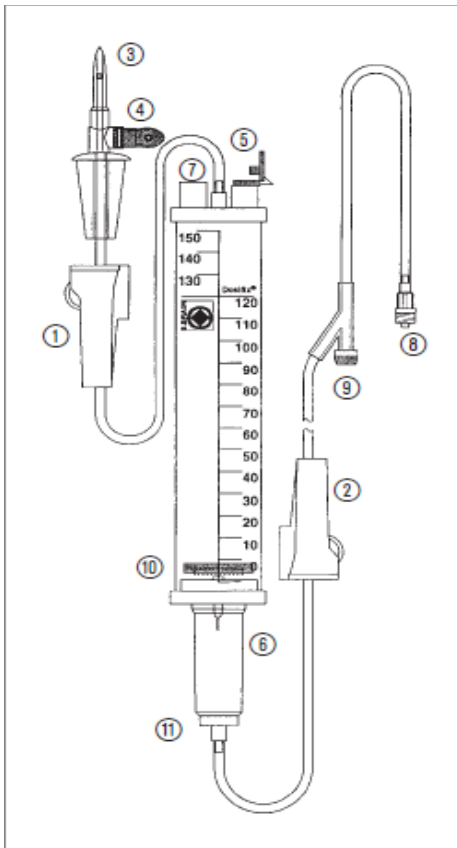

1. Đóng khóa chỉnh giọt (1) và (2).
2. Cắm kim chọc (3) vào nút của chai dịch truyền rồi treo chai lên.
3. Mở van thông khí của kim chọc (4) và của bầu buret (5). Mở khóa chỉnh giọt (1) và cho 20 ml dung dịch chảy vào bầu buret. Đóng khóa chỉnh giọt (1).
4. Điều chỉnh mức dung dịch bằng cách bóp nhẹ bầu đếm giọt loại mềm (6) cho đến khi bầu đầy một nửa. Mở khóa chỉnh giọt (2) và thổi khí hết sạch bong bóng khí. Đóng khóa chỉnh giọt một lần nữa.
5. Mở lại khóa chỉnh giọt (1) và để lượng dung dịch mong muốn chảy vào buồng buret. Đóng khóa chỉnh giọt một lần nữa. Có thể bơm thêm thuốc qua cổng tiêm (7) hoặc chạc chữ Y (9).
6. Gỡ nắp bảo vệ (8) và kết nối với thiết bị tiêm tĩnh mạch.
7. Điều chỉnh tốc độ chảy bằng khóa chỉnh giọt (2) (Ống nhỏ giọt cực nhỏ tạo 60 giọt \cong 1 ml). Một van nổi (10) nằm trong buồng buret ngăn ngừa tắc mạch do bọt khí khi buồng buret cạn hết nước. Bầu đếm giọt chứa bộ lọc 15 µm (11) để lọc hạt trong dung dịch.