

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tên sản phẩm: Băng gạc thấm hút dịch tiết và giảm tải lực tỳ đè

Chủng loại: Askina[®] Transorbent; Askina[®] Transorbent Border; Askina[®] Transorbent Sacrum

1. MÔ TẢ SẢN PHẨM

Askina[®] Transorbent, Askina[®] Transorbent Border, Askina[®] Transorbent Sacrum là băng gạc có nhiều lớp, thoáng khí, gồm những phần sau:

- Lớp keo dính với vùng da xung quanh nhưng không dính vào nền vết thương
- Lớp hydrogel khô có khả năng thấm hút cao
- Lớp bột biên như là tấm nệm lót cho vết thương
- Lớp màng thoáng khí, ngăn nước và vi khuẩn xâm nhập (có thêm một lớp phủ quanh lớp ngoài cùng tạo thành một lớp viền keo dính ở các sản phẩm Askina[®] Transorbent Border, Askina[®] Transorbent Sacrum)

Askina[®] Transorbent, Askina[®] Transorbent Border, Askina[®] Transorbent Sacrum giúp duy trì và cân bằng ẩm tạo điều kiện cho quá trình làm lành vết thương diễn ra tự nhiên.

2. CHỈ ĐỊNH

Băng gạc thấm hút dịch tiết và giảm tải lực tỳ đè (Askina[®] Transorbent, Askina[®] Transorbent Border, Askina[®] Transorbent Sacrum) sử dụng cho các vết thương có dịch tiết từ trung bình đến nhiều, vết thương nông và sâu như tổn thương tỳ đè I- IV, loét động tĩnh mạch, tổn thương thần kinh, với mục đích ngăn ngừa loét da.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Askina[®] Transorbent, Askina[®] Transorbent Border, Askina[®] Transorbent Sacrum không dùng cho các trường hợp sau:

- Loét do nhiễm trùng như lao, giang mai, nhiễm nấm sâu
- Bỏng độ III.
- Trong trường hợp nhiễm trùng với các triệu chứng viêm nhiễm (sốt, phù nề, mẩn đỏ, đau) hãy liên hệ với nhân viên y tế. Bắt đầu sử dụng lại khi vết thương đã trở lại bình thường.

4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

4.1 Làm sạch da

a) Làm sạch vết thương bằng dung dịch làm sạch phù hợp (như Prontosan[®]) với quy trình thông thường.

b) Lau khô vùng da xung quanh vết thương

4.2 Đắp băng gạc

a) Chọn kích thước phù hợp sao cho che phủ hoàn toàn bề mặt vết thương, đảm bảo che phủ từ 2-3 cm từ mép vết thương.

b) Bóc một phần lớp băng keo dính phía ngoài cùng và dán lớp keo dính vào vết thương

c) Vuốt nhẹ phần băng gạc phủ lên vết thương và bóc lớp băng keo dính phía ngoài cùng còn lại.

d) Khi dán băng gạc lên các vùng da gấp khúc (như gót, khuỷu tay), bóc khoảng 1/3 dọc theo mỗi bên để dễ dàng đắp băng gạc và gia tăng độ dính.

Khi đắp băng gạc Askina[®] Transorbent Sacrum cho các vết thương:

- Loét xương cụt, uốn cong nhẹ băng gạc và đặt băng gạc vào rãnh mông

- Khu vực hậu môn, do tính chất của băng gạc này có thể cắt vì vậy có thể đắp băng gạc ở độ sâu khác nhau và vẫn phù hợp với các vị trí.

4.3 Thay băng

Việc lưu băng giữa những lần thay băng phụ thuộc hoàn toàn vào tình trạng vết thương và lượng dịch tiết.

Nên thay băng gạc Askina® Transorbent, Askina® Transorbent Border, Askina® Transorbent Sacrum khi đã đầy dịch tiết: trung bình 2-3 ngày hoặc mỗi 24h nếu lượng dịch tiết nhiều. Khi thấy có sự tràn dịch tiết thì nên thay băng ngay lập tức. Nếu cần thiết, sử dụng dung dịch rửa vết thương để thay băng gạc dễ dàng.

5. LƯU Ý

Lúc đầu khi sử dụng băng gạc trên vết thương, có thể làm rộng vết thương. Điều này rất bình thường và thường xuyên xảy ra với những vết thương cần cắt lọc, loại bỏ mép vết thương. Việc này hỗ trợ quá trình lành thương.

Với những trường hợp do bệnh lý nền làm chậm hay cản trở quá trình lành thương, thì việc điều trị các bệnh lý nền cũng rất cần thiết, còn nếu chỉ dùng Askina® Transorbent, Askina® Transorbent Border, Askina® Transorbent Sacrum thì có thể thấy quá trình lành thương chậm hoặc không cải thiện. Vì vậy, nếu như sau khi sử dụng Askina® Transorbent, Askina® Transorbent Border, Askina® Transorbent Sacrum từ 4-6 tuần mà không thấy cải thiện, thì nên làm lại các phương pháp điều trị, chuẩn đoán ban đầu, đánh giá tổng thể.

Băng gạc tiết trùng trừ khi đóng gói bị hư hỏng hoặc đã mở ra.



VIM15 = tiêu chuẩn an toàn Nga (Gost-R)

KÍCH THƯỚC HIỆN CÓ

Askina® Transorbent có các kích thước như sau:

- 5 x 7 cm • 10 x 10cm
- 15 x 15cm • 20 x 20cm

Askina® Transorbent Border có các kích thước như sau:

- 9 x 14 cm • 14 x 14 cm
- 17 x 17 cm • 24 x 24 cm

Askina® Transorbent Sacrum có các kích thước như sau:

- 16 x 18 cm • 18 x 20 cm
- 20 x 22 cm

Cảnh báo: Việc tái sử dụng các thiết bị chỉ dùng 1 lần sẽ dẫn đến nguy cơ cho người sử dụng hoặc bệnh nhân. Điều này có thể dẫn đến nguy cơ gây nhiễm, và/ hoặc làm hỏng các chức năng của thiết bị. Việc gây nhiễm và/ hoặc làm hạn chế các chức năng của thiết bị có thể gây ra cho bệnh nhân tổn thương, bệnh tật, hoặc tử vong.