



Prontosan® Wound Irrigation Solution Adapter

Nắp nối chuyển dung dịch tưới rửa Prontosan

Hướng dẫn sử dụng:

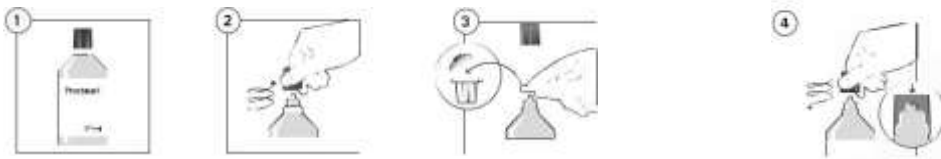

1 – 4 Mở nắp chai Prontosan® Wound Solution bằng cách loại bỏ vòng nhựa trắng ra khỏi cổ chai rồi xoáy chặt nắp xanh để tạo lỗ mở.

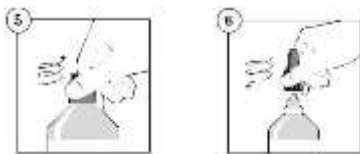

5 – 6 Tháo nắp xanh ra khỏi chai và gắn Prontosan® Wound Irrigation Solution Adapter vào cổ chai



7 Kết nối với Prontosan® Wound Irrigation Solution Adapter từ chai đựng và treo chai lên.



Giữ cho khóa van đóng kín để dung dịch Prontosan® Wound Irrigation Solution truyền từ chai máy vào trong suốt quá trình rửa.

Không được tiêm!