

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tên sản phẩm: Bơm tiêm nhựa không kim

Chủng loại: Omnifix®

Chỉ định

Sử dụng trong pha chế, tiêm truyền (thủ công hoặc bằng bơm tiêm điện), rút dịch.

Chống chỉ định

Hiện chưa có chống chỉ định đối với sản phẩm.

Cảnh báo

- Sử dụng ngay sau khi xé bao gói sản phẩm
- Sau khi sử dụng, vứt bỏ đúng cách và an toàn để tránh nguy cơ lây nhiễm.
- Không thay vỏ bọc sau khi sử dụng.

Thận trọng

- Không tiệt trùng lại hoặc tái sử dụng.
- Không sử dụng nếu bao gói hoặc sản phẩm đã bị hư hỏng hoặc bị ô nhiễm.

Hướng dẫn sử dụng

- Để mở bao gói sản phẩm: gỡ lớp bao bì trên của bao gói
- Kết nối phần đầu của bơm tiêm vào các lọ đựng dịch tiêm truyền (dùng kim hoặc không)
- Kéo phần đuôi của bơm tiêm cho đến khi đạt được thể tích mong muốn. Sau đó ngắt kết nối khỏi lọ đựng dịch truyền. Lặp lại nhiều lần cho đến khi đạt các thể tích và liều lượng thích hợp.
- Tiến hành đuổi khí ra khỏi bơm tiêm trước khi kết nối đến bệnh nhân.
- Trong trường hợp cần sử dụng với bơm tiêm điện. Cần kiểm tra tính tương thích của bơm tiêm và bơm tiêm điện. Tiến hành lắp bơm tiêm vào theo hướng dẫn của nhà sản xuất bơm tiêm điện.

Chú ý:

- Không để sản phẩm ở nơi có độ ẩm, nhiệt độ cao và tránh để trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời.
- Sản phẩm tiệt trùng, sử dụng một lần
- Sản phẩm không độc, không có thuốc nhuộm, không chứa latex