

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tên sản phẩm: **Dây nối dài dùng trong truyền dịch, bơm thuốc**

Chủng loại: Extension Line (Type: Heidelberg)

### Mô tả sản phẩm

Dây nối Heidelberg có các kích thước 30cm đến 320 cm. Dây nối không bị xoắn gãy gập, không bám bọt khí trên dây, có đầu khóa vặn xoắn an toàn chịu áp lực cao, chống rò rỉ, không có chất gây độc di-2-ethylhexyl phthalate (DEHP).

### Chỉ định

Dùng để nối dài khi truyền dịch thông thường, bơm thuốc cản quang hay truyền dịch bằng máy bơm tiêm điện tự động.

### Chống chỉ định

Hiện chưa có chống chỉ định đối với sản phẩm.

### Nguy cơ/ Cảnh báo

Sản phẩm chỉ sử dụng một lần.

Tái sử dụng thiết bị sử dụng một lần gây nguy cơ cao cho bệnh nhân và người sử dụng. Nó có thể dẫn tới nhiễm khuẩn và/hoặc suy giảm chức năng. Nhiễm khuẩn và/hoặc giới hạn các chức năng của thiết bị có thể dẫn đến tổn thương, bệnh hoặc tử vong cho bệnh nhân.

Không sử dụng nếu bao bì bị phá hủy.

Không tái khử trùng.

### Hướng dẫn sử dụng

Sử dụng kỹ thuật vô khuẩn.

Kết nối dây nối Heidelberg vào đầu luer lock theo các bước sau:

- Kiểm tra bao bì, nguyên vẹn, không bị lỗi và kín để đảm bảo vô trùng cho các sản phẩm
- Tháo bao bì, kéo thẳng dây
- Tháo đầu nắp và kết nối 2 đầu luer lock vào đường truyền