

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tên sản phẩm: Túi hậu môn nhân tạo PROXIMA một mảnh, loại xả

CHỈ ĐỊNH

Túi hậu môn nhân tạo PROXIMA một mảnh dùng cho chứa chất thải từ lỗ mở đại tràng ra da

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Trước khi sử dụng

Rửa tay sạch. Đo kích thước lỗ mở đại tràng

Cắt để dán da rộng ra sao cho vừa với kích thước lỗ mở. Chừa lại 1 khoảng nhỏ xung quanh lỗ mở (A)

Chuẩn bị da:

- Làm sạch da xung quanh lỗ mở bằng nước ấm. Tránh dùng các chất diệt khuẩn như: ete, cồn hoặc các chất sát khuẩn khác có thể làm mất khả năng bám dính của đế dán da
- Lau khô da nhẹ nhàng bằng khăn giấy mềm.

2. Gắn túi

Làm phẳng túi bằng cách tách mặt trong của túi (B).

Tháo bỏ lớp giấy phủ trên bề mặt của đế dán da (C).

Áp phần đáy của miếng dán lên da xung quanh lỗ mở rồi đến phần trên của miếng dán sao cho không tạo nếp gấp, sau đó vuốt và miết nhẹ để dán để áp sát, bảo đảm lớp keo dính và che phủ hoàn toàn vùng da xung quanh lỗ mở (D).

3. Tháo bỏ túi


Một tay nắm miếng tháo nằm trên đế dán và kéo nhẹ để gỡ bỏ túi từ trên xuống dưới, tay còn lại vẫn giữ, đè nhẹ nhàng vào vùng da xung quanh lỗ mở.

4. Xả túi

Đảm bảo rằng túi chứa được đóng kín trước khi sử dụng. Sử dụng kẹp mềm kèm theo hộp để đóng túi lại (E-F-G).

Ngoài ra, có thể sử dụng kẹp cứng (đặt riêng: tham khảo F00727).

Để làm trống túi, tháo kẹp ra và xả vào bồn cầu. Lau miệng xả bằng khăn giấy và kẹp túi lại.

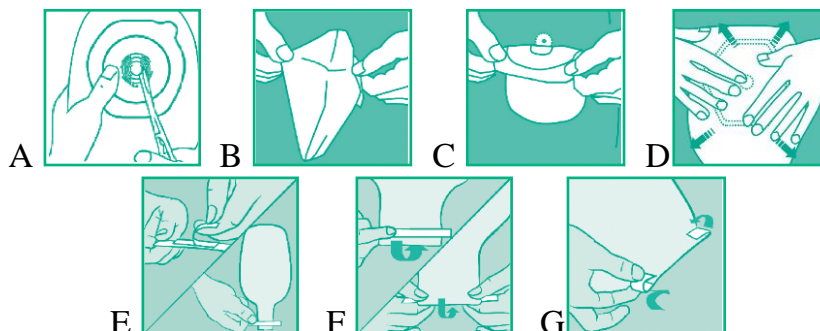

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không có chống chỉ định chính thức nào đối với PROXIMA một mảnh và kẹp mềm.
Là dụng cụ chỉ sử dụng một lần, sản phẩm PROXIMA một mảnh và kẹp mềm không được tái sử dụng.
Kẹp cứng có thể được tái sử dụng.

CẢNH BÁO/THẬN TRỌNG

Việc tái sử dụng những dụng cụ dùng một lần có thể gây rủi ro tiềm ẩn đối với bệnh nhân.
Điều này sẽ gây nguy cơ nhiễm bẩn hoặc giảm tác dụng của dụng cụ.
Không có biện pháp đề phòng chính thức nào cho việc sử dụng dụng cụ y tế trên.