

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tên trang thiết bị y tế: Kim cánh bướm

Chủng loại: Venofix[®] A

Mã sản phẩm: 4056310; 4056337; 4056345; 4056353; 4056361; 4056370; 4056388

Vật liệu được sử dụng

PE, ABS, PVC, thép crom-niken

Chỉ định

Tạo đường tiếp cận tĩnh mạch ngoại vi.

Truyền dịch trong thời gian ngắn.

Lấy mẫu máu

An toàn khi sử dụng cùng với thiết bị truyền chịu áp lực. Thể tích bolus ở 40°C và 2 bar ≤ 1ml (Perfusor[®]III)

Chống chỉ định

Không nên dùng Venofix[®] A trong trường hợp đã có chứng thực quá mẫn cảm với bất kỳ vật liệu nào được sử dụng.

Nguy cơ

Do kim sắc nhọn nên thành mạch máu có nguy cơ bị tổn thương trong quá trình truyền. Do đó bệnh nhân phải được bố trí tư thế phù hợp nhằm đảm bảo tính cố định của khu vực tiêm truyền. Khu vực tiêm truyền phải được kiểm soát thường xuyên trong suốt quá trình truyền để có thể kịp thời phát hiện tình trạng tắc ở xung quanh.

Cảnh báo

Tái sử dụng thiết bị dùng một lần duy nhất sẽ gây nguy cơ tiềm ẩn cho bệnh nhân hoặc người sử dụng.


Việc này có thể dẫn đến nhiễm khuẩn và/hoặc hư hỏng khả năng hoạt động. Sự nhiễm khuẩn và/hoặc hạn chế chức năng của thiết bị có thể khiến bệnh nhân bị tổn thương, đau ốm hoặc tử vong.

Thời gian sử dụng


Chỉ thích hợp để sử dụng trong thời gian ngắn.

Hướng dẫn sử dụng


1. Sau khi khử trùng khu vực đâm kim và tháo nắp bảo vệ, hay mở nắp đậy bằng cách xoay 1/4 vòng.

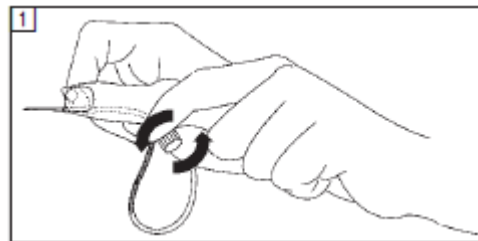


2. Đâm kim vào tĩnh mạch đã chọn, giữ kim bằng cánh đã được gấp lại.

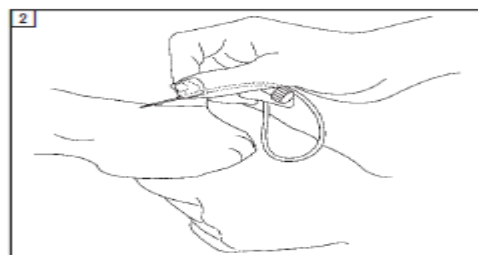


3. Đóng nắp đậy lại sau khi máu chảy vào ống để ngăn máu không chảy ra.

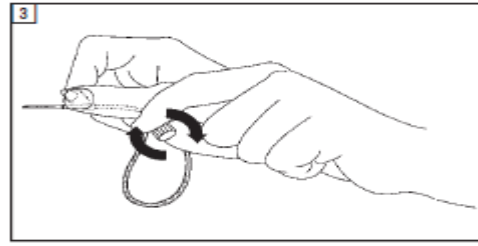

4. Cố định kim bằng cánh đã mở ra và dây nối vào da bằng cách quấn băng dán vòng quanh để giảm bớt độ căng.

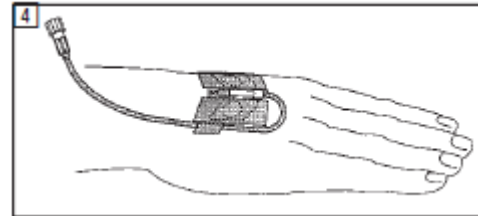

5. Nối dịch truyền hoặc xy-lanh sau khi tháo nắp đậy.

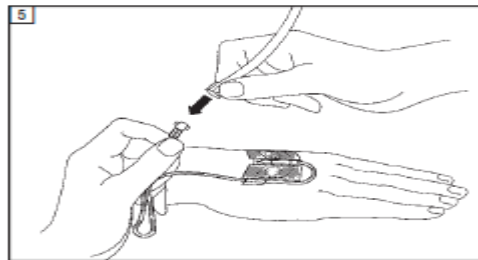

Chú thích ý nghĩa của các biểu tượng



Không sử dụng lại



Thận trọng



Tham khảo hướng dẫn sử dụng



Số lô



Tiệt trùng



Hạn sử dụng



Nhà sản xuất



Ngày sản xuất



Không chứa DEHP

Chủ sở hữu sản phẩm: B. Braun Melsungen AG, Đức

Cơ sở sản xuất: B. Braun Medical Industries Sdn. Bhd.

Địa chỉ: Bayan Lepas Free Industrial Zone, 11900 Penang, Malaysia