

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tên sản phẩm: **Dây nối dài dùng trong truyền dịch, bơm thuốc**
Chủng loại: **Extension Line**, type: Minimum Volume

Chỉ định

Dùng trong truyền dịch, bơm thuốc bằng máy bơm tiêm điện tự động.

Chống chỉ định

Hiện chưa có chống chỉ định đối với sản phẩm.

Nguy cơ/ Cảnh báo

Sản phẩm chỉ sử dụng một lần.

Khi sử dụng với Propofol hoặc dung dịch sát khuẩn alcohol, có thể hình thành các vết nứt do tương tác với thuốc. Những vết nứt này có thể dẫn đến rò rỉ, hoặc không khí vào đường truyền. Do đó, khuyến cáo quan sát kỹ khi truyền dịch với các loại thuốc trên.

Khuyến cáo khi sử dụng Propofol, có thể sử dụng các loại dây PP, PE.

Tái sử dụng thiết bị sử dụng một lần gây nguy cơ cao cho bệnh nhân và người sử dụng. Nó có thể dẫn tới nhiễm khuẩn và/ hoặc suy giảm chức năng. Nhiễm khuẩn và/hoặc giới hạn các chức năng của thiết bị có thể dẫn đến tổn thương, bệnh tật, thậm chí gây tử vong cho bệnh nhân.

Không sử dụng nếu bao bì bị phá hủy.

Không tái khử trùng.

Hướng dẫn sử dụng

Sử dụng kỹ thuật vô khuẩn.

Kết nối dây nối vào đầu nối (luer lock) theo các bước sau:

- Kiểm tra bao bì, nguyên vẹn, không bị lỗi và kín để đảm bảo vô trùng cho các sản phẩm
- Tháo bao bì, kéo thẳng dây
- Tháo đầu nắp và kết nối 2 đầu nối (leur lock) vào đường truyền.