

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

### Tên sản phẩm: Đầu kim tiêm

Chủng loại: Sterican®

### Chỉ định

Sterican® là đầu kim tiêm vô trùng sử dụng một lần có thể sử dụng để lấy máu, tiêm tĩnh mạch, tiêm dưới da, tiêm bắp, khớp và các mô mềm, tiêm nội nhãn.

### Chống chỉ định

Không có.

### Cẩn trọng

- Sử dụng sản phẩm theo quy trình chuẩn kiểm soát nhiễm khuẩn của cơ sở y tế và bộ y tế.
- Sử dụng kỹ thuật vô khuẩn theo hướng dẫn của cơ sở y tế và bộ y tế.
- Hủy bỏ kim theo hướng dẫn của cơ sở y tế và bộ y tế.
- Tổn thương do vật sắc nhọn với kim tiêm nhiễm khuẩn có thể gây các bệnh nhiễm trùng.

### Cảnh báo

- Không sử dụng nếu bao bì bị mở hay phá hủy.
- Sử dụng một lần. Không tái sử dụng.
- Kim nhiễm khuẩn hoặc/ và giới hạn các chức năng có thể gây ra tổn thương, gây bệnh, tử vong cho bệnh nhân.

### Hướng dẫn sử dụng

Sử dụng kỹ thuật vô khuẩn. Sử dụng sản phẩm theo quy trình chuẩn kiểm soát nhiễm khuẩn

1. Tháo kim ra khỏi bao bì.
2. Gắn kim chặt vào bơm tiêm khóa trượt hoặc khóa vặn xoắn.
3. Giữ kim bằng một tay và cẩn thận bỏ nắp bảo vệ kim theo hướng thẳng để tránh bị kim đâm.
4. Thực hiện thao tác theo quy trình đã được thiết lập.
5. Hủy bỏ kim vào thùng hủy kim ngay lập tức theo quy trình chuẩn của cơ sở y tế và theo quy định đối với vật tư y tế sắc nhọn.