

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

**Tên sản phẩm:** Bơm tiêm nhựa chính xác không kim

**Chủng loại:** Omnifix®-F Luer Solo; Omnifix®-H Luer Solo

### **Chỉ định**

Sử dụng trong pha chế, tiêm truyền, rút dịch

### **Chống chỉ định**

Hiện chưa có chống chỉ định đối với sản phẩm.

### **Cảnh báo**

- Sử dụng ngay sau khi xé bao gói sản phẩm
- Sau khi sử dụng, vứt bỏ đúng cách và an toàn để tránh nguy cơ lây nhiễm.
- Không thay vỏ bọc sau khi sử dụng.

### **Thận trọng**

- Không tiết trùng lại hoặc tái sử dụng.
- Không sử dụng nếu bao gói hoặc sản phẩm đã bị hư hỏng hoặc bị ô nhiễm.

### **Hướng dẫn sử dụng**

- Để mở bao gói sản phẩm: gỡ lớp bao bì trên của bao gói
- Kết nối phần đầu của bơm tiêm vào các lọ đựng dịch tiêm truyền
- Kéo phần đuôi của bơm tiêm cho đến khi đạt được thể tích mong muốn. Sau đó ngắt kết nối khỏi lọ đựng dịch truyền. Lặp lại nhiều lần cho đến khi đạt các thể tích và liều lượng thích hợp.
- Tiến hành đuổi khí ra khỏi bơm tiêm trước khi kết nối đến bệnh nhân

### **Chú ý:**

- Không để sản phẩm ở nơi có độ ẩm, nhiệt độ cao và tránh để trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời.
- Sản phẩm sử dụng một lần
- Sản phẩm không độc, không có thuốc nhuộm, không chứa latex