

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tên sản phẩm: **Khóa ba ngã**

Chủng loại: **Discofix[®]**

Mô tả sản phẩm

Khóa ba ngã Discofix[®] loại không có dây nối hoặc có dây nối 10cm, 25cm, 50cm, 75cm, 100cm. Có thể xoay 360 độ. Chịu áp lực, không bị rò rỉ khi truyền với các loại nhũ dịch béo, không bị tắc nghẽn.

Vật liệu được sử dụng

PC, PP, SI

Chỉ định

Sử dụng để kết nối các đường truyền.

Chống chỉ định

Hiện chưa có chống chỉ định đối với sản phẩm.

Nguy cơ/ Cảnh báo

Tái sử dụng thiết bị sử dụng một lần gây nguy cơ cao cho bệnh nhân và người sử dụng. Nó có thể dẫn tới nhiễm khuẩn và/ hoặc suy giảm chức năng. Nhiễm khuẩn và/ hoặc giới hạn các chức năng của thiết bị có thể dẫn đến tổn thương, bệnh hoặc chết cho bệnh nhân.

Không sử dụng nếu bao bì bị phá hủy.

Không tái khử trùng.

Các bước dẫn sử dụng

Sử dụng kỹ thuật vô khuẩn.

- Lau vị trí tiêm thuốc trước khi dùng theo quy trình tại cơ sở y tế.
- Sử dụng xy lanh có đầu khóa vặn xoắn không kim để kết nối. Xy lanh có đầu khóa trượt phải được gắn chặt và xoay 90°. Thông rửa theo quy trình tại cơ sở y tế. Sản phẩm thay thế theo quy trình tại cơ sở y tế và Bộ Y Tế.
- Chúng tôi khuyến cáo đuổi khí hoàn toàn bộ khóa ba ngã. Nếu không đuổi khí cẩn thận, 0.15 ml khí ở mỗi đầu khóa có thể còn lại trong hệ thống truyền dịch.
- Khử khuẩn đầu khóa bằng Softa[®] Cloth CHX 2% theo hướng dẫn của sản phẩm.