

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Dung dịch khử khuẩn máy thận nhân tạo Axit Citric 50%

Chủng loại: Tricarb C-50

Mã sản phẩm: 3613000

Chất lỏng đậm đặc để làm sạch, khử canxi và khử trùng bằng nhiệt cho máy chạy thận nhân tạo.

Diệt khuẩn, nấm, trực khuẩn lao và virus (bao gồm HBV, HCV, HIV) theo tiêu chuẩn EN 13727/14561, EN 13624/14562, EN 14348/14563, EN 14476 ở nhiệt độ 83°C, thời gian khử khuẩn 15 phút, nồng độ hiệu quả là 3% Tricarb C-50.

Thành phần

1000 ml chứa:

axit citric khan 500 g

Liều dùng / Cách sử dụng

Hút dung dịch đậm đặc bằng vòi khử trùng.

Nồng độ hiệu quả là 3%.

Xin lưu ý đến các hướng dẫn của nhà sản xuất dành cho máy thận nhân tạo.

Cảnh báo và thận trọng

Gây kích ứng mắt nghiêm trọng.

Đeo kính bảo hộ.

TRONG TRƯỜNG HỢP TIẾP XÚC VỚI MẮT:

Rửa cẩn thận bằng nước trong vài phút. Tháo kính áp tròng nếu có và tiếp tục rửa.

Nếu tình trạng kích ứng mắt vẫn còn: hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ.

Gây kích ứng nhẹ cho da và niêm mạc.

Đeo găng tay an toàn trong khi làm việc.

Trong trường hợp vô tình tiếp xúc với da, phải rửa sạch với thật nhiều nước ngay lập tức.

Nếu nuốt phải, hãy uống thật nhiều nước.

Gặp bác sĩ ngay lập tức.

Không pha Tricarb C-50 với các sản phẩm khử trùng bằng clo.

Đóng nắp bình chứa khi không sử dụng.

Xin lưu ý bảng chỉ dẫn an toàn.

Thải bỏ theo quy định hiện hành của địa phương và bảng chỉ dẫn an toàn.



Không bảo quản ở nhiệt độ dưới 5°C.

Không bảo quản ở nhiệt độ trên 30°C



Hạn sử dụng



Ký hiệu lô hàng