

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

**Tên sản phẩm:** Khóa ba ngã chống nứt gãy

**Chủng loại:** Discifix® C

### Chỉ định

Sử dụng để kết nối các đường truyền.

### Chống chỉ định

Hiện chưa có chống chỉ định đối với sản phẩm.

### Các bước sử dụng

Sử dụng kỹ thuật vô khuẩn.

Lau vị trí tiêm thuốc trước khi dùng theo quy trình tại cơ sở y tế.

Sử dụng xy lanh có đầu khóa vặn xoắn không kim để kết nối. Xy lanh có đầu khóa trượt phải được gắn chặt và xoay 90°. Thông rửa theo quy trình tại cơ sở y tế. Sản phẩm thay thế theo quy trình tại cơ sở y tế và Bộ Y Tế.

Chúng tôi khuyến cáo đuổi khí hoàn toàn bộ khóa ba ngã. Nếu không đuổi khí cẩn thận, 0.15 ml khí ở mỗi đầu khóa có thể còn lại trong hệ thống truyền dịch.

Khử khuẩn đầu khóa bằng Softa® Cloth CHX2% theo hướng dẫn của sản phẩm.


### Cảnh báo


Tái sử dụng thiết bị sử dụng một lần gây nguy cơ cao cho bệnh nhân và người sử dụng. Nó có thể dẫn tới nhiễm khuẩn và/ hoặc suy giảm chức năng. Nhiễm khuẩn và/ hoặc giới hạn các chức năng của thiết bị có thể dẫn đến tổn thương, bệnh hoặc chết cho bệnh nhân. Không sử dụng nếu bao bì bị phá hủy.

Không tái khử trùng.





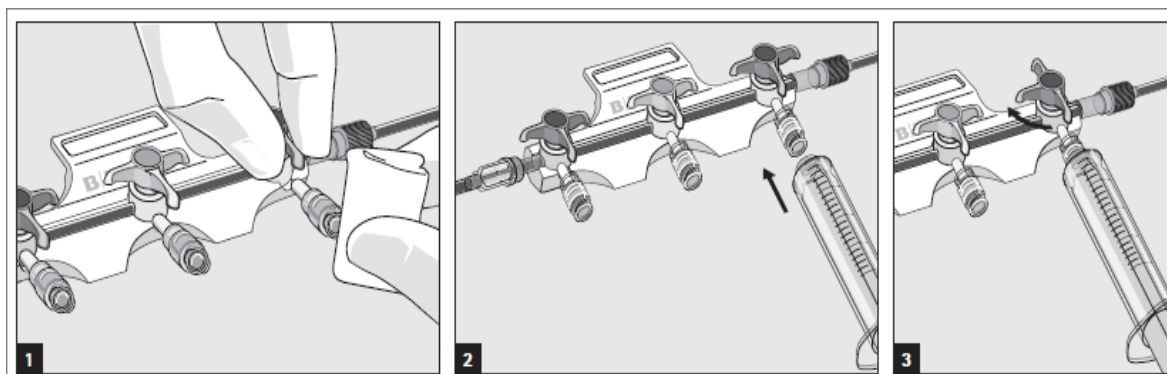

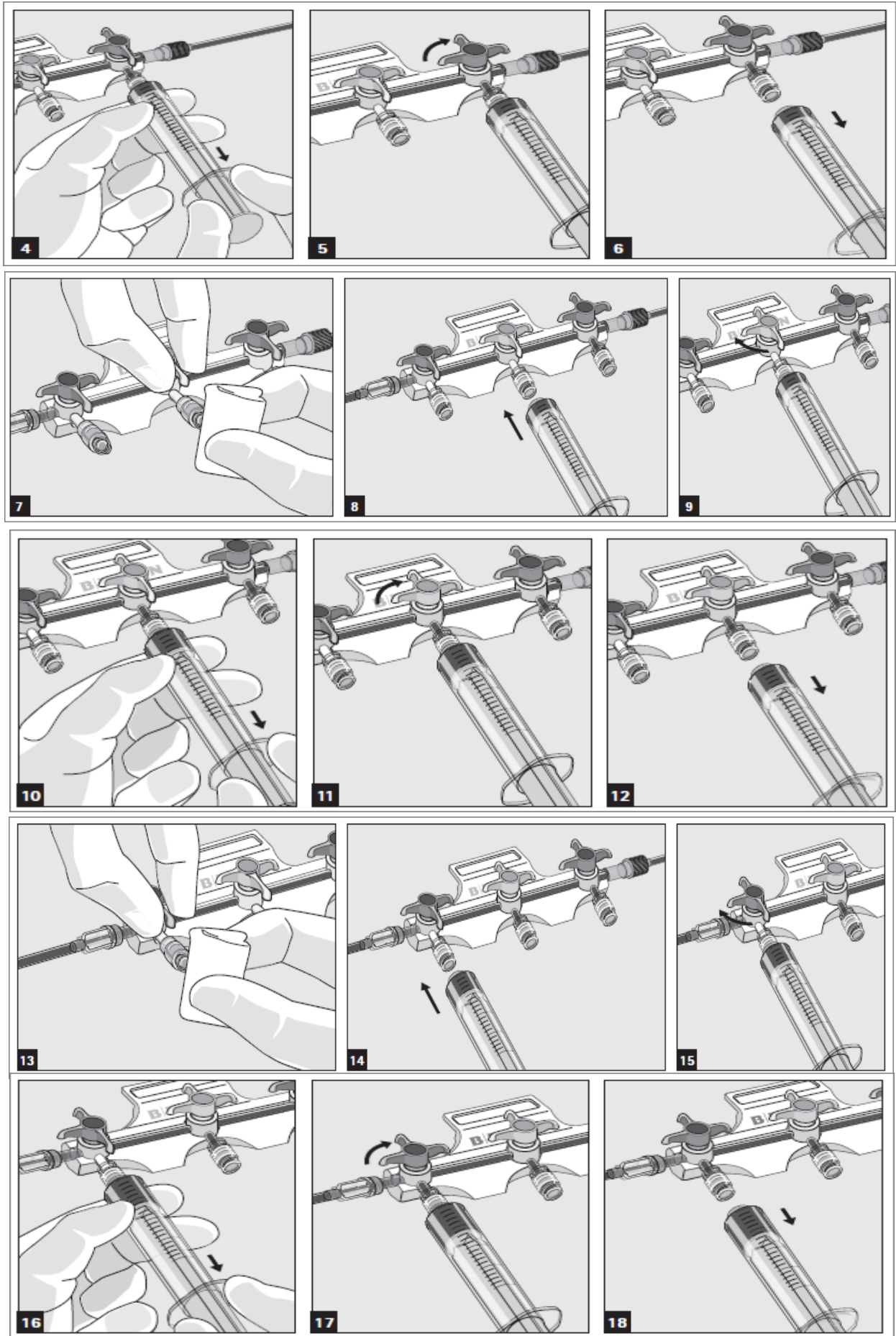



Chất sát khuẩn được khuyến cáo: Softa® Cloth CHX2% (Nhà sản xuất: B. Braun Medical AG, Sempach, Thụy Sĩ).

### Hình minh họa các bước sử dụng sản phẩm





Chú thích ý nghĩa của các biểu tượng

	Không sử dụng lại			Chủ sở hữu sản phẩm
	Tham khảo hướng dẫn sử dụng			Ngày sản xuất
	Số lô			Không chứa DEHP
	Tiệt trùng bằng ethylene oxide			Không có Latex
	Hạn sử dụng			Không chứa PVC