

LƯỚI DAO LẤY DA

Chỉ định

Lưỡi dao lấy da được sử dụng cùng cán dao không kèm lưỡi phù hợp, dùng để lấy da, rạch da, tổ chức...cho mọi chỉ định phẫu thuật đại phẫu, trung phẫu, tiểu phẫu.

Hướng dẫn sử dụng

Lựa chọn lưỡi dao lấy da phù hợp với cán dao, sử dụng kẹp để gấp lưỡi dao cài vào rãnh trên cán dao, sau đó sử dụng để lấy da, rạch da, tổ chức...theo yêu cầu của phẫu thuật viên.

Hướng dẫn làm sạch, khử khuẩn và tiệt khuẩn

Phương pháp áp dụng	Mô tả	Chú ý/ Giải thích
Chuẩn bị tại vị trí sử dụng	Ướt hoặc khô	Ướt có nghĩa là các dụng cụ được ngâm trong dung dịch khử khuẩn hoạt động không cố định ngay sau khi vận hành. Vui lòng tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất. Khô có nghĩa là các dụng cụ được chuyển đến bộ phận cung ứng tiệt khuẩn trung tâm (CSSD - central sterile supply department) mà không cần bất kỳ chất khử khuẩn nào hoặc chất lỏng bổ sung khác ngay sau khi vận hành.
Làm sạch và khử khuẩn	Quy trình thủ công hoặc bằng máy có hoặc không có sử dụng sóng siêu âm.	
Nhiệt độ và hóa chất làm sạch và khử khuẩn		Giả sử rằng các sản phẩm được sử dụng để làm sạch và khử khuẩn có sẵn trên thị trường và được cấp phép cho ứng dụng tương ứng, và theo dõi nồng độ, thời gian phơi nhiễm và nhiệt độ được khuyến nghị. Phải đảm bảo rằng không có dư lượng còn lại trên các sản phẩm. Nước khử khoáng nên được sử dụng để rửa cuối cùng.
Làm khô	Làm khô tại nhiệt độ tối đa: 120°C/248°F	
Quy trình tiệt khuẩn bằng hơi	Nhiệt độ tối đa 134°C/273°F, thời gian giữ 18 phút.	Đây là nhiệt độ và thời gian giữ tối đa.

Các quy trình tiệt khuẩn khác	Formaldehyde (tối đa 65°C/149°F), ethylene oxide (tối đa 65°C/149°F), không khí nóng (tối đa 180°C/356°F), gas plasma (ví dụ: STERRAD®)	Sự tương thích vật liệu với các quá trình khử khuẩn này không có nghĩa đạt được độ tiệt khuẩn. Người sử dụng có trách nhiệm đảm bảo rằng hiệu quả khử khuẩn dự định đạt được với quá trình tương ứng.
Quy trình thẩm định tiệt khuẩn	Hơi nước tiệt khuẩn qua quá trình hút chân không phân đoạn 134°C/273°F, giữ thời gian 5 phút, như được mô tả trong hướng dẫn sử dụng.	

Chống chỉ định

Không có

Cảnh báo, thận trọng

- Sản phẩm sử dụng một lần, không được tái sử dụng.
- Tái sử dụng sản phẩm dùng một lần gây nhiễm khuẩn và nguy hiểm cho bệnh nhân.
- Đảm bảo thiết bị và các phụ kiện được vận hành và sử dụng bởi người đã được đào tạo, có kiến thức hoặc kinh nghiệm.
- Đọc, tuân thủ và giữ gìn tài liệu hướng dẫn sử dụng.
- Chỉ sử dụng sản phẩm theo mục đích sử dụng của nó.
- Không sử dụng sản phẩm từ bao bì tiệt khuẩn bị rách hoặc đã mở.
- Trước khi sử dụng, kiểm tra xem các bộ phận sản phẩm có bị lỏng, cong, vỡ, nứt hoặc gãy không.
- Không sử dụng nếu sản phẩm bị hư hỏng hay bị lỗi. Để riêng sản phẩm ra nếu bị hư hỏng.
- Không tiệt khuẩn lại sản phẩm.
- Không sử dụng sản phẩm đã hết hạn.

Tác dụng bất lợi có thể xảy ra

- Nhiễm khuẩn cho người bệnh và/hoặc người sử dụng và ảnh hưởng tới chức năng của sản phẩm do tái sử dụng.
- Nguy cơ bị thương, bị bệnh hoặc tử vong do nhiễm khuẩn và ảnh hưởng tới chức năng của sản phẩm!

Bảo quản

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát.