

CÔNG TY TNHH B.BRAUN VIỆT NAM

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

LƯỠI DAO PHẪU THUẬT DÙNG MỘT LẦN

Chỉ định

Được sử dụng cùng cán dao không kèm lưỡi phù hợp, dùng để rạch da, tổ chức... cho mọi chỉ định phẫu thuật đại phẫu, trung phẫu, tiểu phẫu.

Hướng dẫn sử dụng

Lựa chọn lưỡi dao phù hợp với cán dao, sử dụng kẹp để gấp lưỡi dao cài vào rãnh trên cán dao, sau đó sử dụng để rạch da, tổ chức... theo yêu cầu của phẫu thuật viên.

Sản phẩm được chiếu xạ/ hấp tiệt khuẩn/ tiệt khuẩn bằng khí EO và được đóng gói trong bao vô trùng.

Chống chỉ định

Không có

Cảnh báo, thận trọng

- Sản phẩm sử dụng một lần, không được tái sử dụng.
- Tái sử dụng sản phẩm dùng một lần gây nhiễm khuẩn và nguy hiểm cho bệnh nhân.
- Đảm bảo thiết bị và các phụ kiện được vận hành và sử dụng bởi người đã được đào tạo, có kiến thức hoặc kinh nghiệm.
- Đọc, tuân thủ và giữ gìn tài liệu hướng dẫn sử dụng.
- Chỉ sử dụng sản phẩm theo mục đích sử dụng của nó.
- Không sử dụng sản phẩm từ bao bì tiệt khuẩn bị rách hoặc đã mở.
- Trước khi sử dụng, kiểm tra xem các bộ phận sản phẩm có bị lỏng, cong, vỡ, nứt hoặc gãy không.
- Không sử dụng nếu sản phẩm bị hư hỏng hay bị lỗi. Để riêng sản phẩm ra nếu bị hư hỏng.
- Không tiệt khuẩn lại sản phẩm.
- Không sử dụng sản phẩm đã hết hạn.

Tác dụng bất lợi có thể xảy ra

- Nhiễm trùng, chảy máu.
- Lây nhiễm chéo nếu dụng cụ không được xử lý đúng cách.

Bảo quản

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát.