

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tên sản phẩm: Khóa ba ngã

Chủng loại: Discofix®

Mô tả sản phẩm

Khóa ba ngã Discofix® loại không có dây nối hoặc có dây nối 10cm, 25cm, 50cm, 75cm, 100cm. Có thể xoay 360 độ. Chịu áp lực, không bị rò rỉ khi truyền với các loại nhũ dịch béo, không bị tắc nghẽn.

Vật liệu được sử dụng

PC, PP, SI

Chỉ định

Sử dụng để kết nối các đường truyền.

Chống chỉ định

Hiện chưa có chống chỉ định đối với sản phẩm.

Nguy cơ/ Cảnh báo

Tái sử dụng các thiết bị sử dụng một lần gây nguy cơ tiềm ẩn cho bệnh nhân và người sử dụng. Có thể dẫn tới nhiễm khuẩn và/ hoặc suy giảm chức năng hoạt động. Sự nhiễm khuẩn và/ hoặc hạn chế chức năng của thiết bị có thể khiến bệnh nhân bị tổn thương, đau ốm hoặc tử vong.

Khóa ba ngã dễ bị nứt dưới những tác động sau:

- tiếp xúc trực tiếp với dịch truyền và thuốc
- chất khử trùng có cồn
- thay đổi nhiệt độ bất ngờ trong liệu pháp
- cặn máu đông hay tiểu cầu cũng như các chất kết tủa không tương thích về mặt lý hóa tại khớp nối.

Những vết nứt có thể gây trào dịch ra hoặc tràn khí vào.

Chúng tôi khuyến nghị kiểm tra những mối nguy này trên toàn bộ đường truyền.

Nếu không chắc, chúng tôi khuyến nghị, đặc biệt khi truyền những thuốc sau, nên dùng một khóa riêng (Discofix® C), loại này có thể chống chịu những thuốc sau:

- Ciclosporin
- Cyclophosphamid
- Etoposid
- Nimodipin
- Phenyltoin-sodium
- Propofol

Vui lòng xem kỹ hướng dẫn sử dụng và thông tin đặc thù của mỗi nhà sản xuất.

Không sử dụng nếu bao bì bị phá hủy.

Không tái tiệt trùng.









Các bước dẫn sử dụng

Sử dụng kỹ thuật vô khuẩn.

- Lau vị trí tiêm thuốc trước khi dùng theo quy trình tại cơ sở y tế.

- Sử dụng xy lanh có đầu khóa vặn xoắn không kim để kết nối. Xy lanh có đầu khóa trượt phải được gắn chặt và xoay 90°. Thông rửa theo quy trình tại cơ sở y tế. Sản phẩm thay thế theo quy trình tại cơ sở y tế và Bộ Y Tế.
- Chúng tôi khuyến cáo đuổi khí hoàn toàn bộ khóa ba ngã. Nếu không đuổi khí cẩn thận, 0.15 ml khí ở mỗi đầu khóa có thể còn lại trong hệ thống truyền dịch.
- Khử khuẩn đầu khóa bằng Softa® Cloth CHX 2% theo hướng dẫn của sản phẩm.

Chú thích ý nghĩa của các biểu tượng

	Không sử dụng lại			Tiệt trùng
	Thận trọng			Hạn sử dụng
	Tham khảo hướng dẫn sử dụng			Nhà sản xuất
	Số lô			Ngày sản xuất

Chủ sở hữu sản phẩm: B. Braun Melsungen AG, Đức

Cơ sở sản xuất: B. Braun Medical AG.

Địa chỉ: Hauptstraße 39, 6182 Escholzmatt, Thụy Sĩ