

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

## **Kim chọc động mạch (Intradyn Introducer needle/Intradyn Puncture needle) Mã sản phẩm: 5208505**

### **Mô tả sản phẩm**

Kim chọc Intradyn (20 G) theo thủ thuật Seldinger được làm bằng thép không gỉ với đầu cắm Luer-Lock. Kim có phần đầu cắm thon tròn, dễ dàng kết hợp với dây dẫn (Đường kính tối đa lên đến 0,035" (0,089 mm)).

### **Chỉ định**

Kim chọc Intradyn là kim an toàn để chọc tĩnh mạch hoặc động mạch, tạo điều kiện cho việc luồn dây dẫn và đưa thiết bị vào lòng mạch vào bằng thủ thuật Seldinger. Sản phẩm dùng trong can thiệp, chụp cản quang mạch máu hoặc các mục đích theo dõi khác.

### **Chống chỉ định**

Hiện chưa có thông tin

### **Nguy cơ**

Hiện chưa có thông tin

### **Thận trọng**

Trước khi sử dụng, cần kiểm tra kim chọc Intradyn để phát hiện hỏng hóc và đảm bảo bao bì chưa bị mở. Không sử dụng thiết bị hỏng. Việc đặt kim chọc Intradyn cần được thực hiện bởi nhân viên có trình độ, đã được đào tạo bài bản trong việc áp dụng các kỹ thuật an toàn và cách xử lý các biến chứng có thể xảy ra (như tổn thương do mũi kim).

### **Hướng dẫn hủy bỏ**

Sau khi sử dụng, hủy bỏ sản phẩm và bao bì theo chính sách của bệnh viện, cơ quan quản lý hay chính quyền địa phương.