

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tên trang thiết bị y tế: Dụng cụ xoay

Mô tả sản phẩm

Tay quay dây dẫn là phụ kiện dùng để kết hợp với dây dẫn để điều khiển dây dẫn trong can thiệp tim mạch. Thiết bị trong suốt, có bộ phận gắn với dây dẫn phù hợp với đường kính dây lên đến 0,022 mm.

Chỉ định

Tay quay dây dẫn là thiết bị cố định dùng trong quá trình can thiệp để điều khiển và kiểm soát chuyển động của dây dẫn ở đầu xa và để điều hướng trong lòng mạch.

Chống chỉ định

Bệnh nhân được biết nhạy cảm với các vật liệu được dùng

Cảnh báo

Các biến chứng tiềm ẩn có thể xảy ra khi chỗ kết nối với các thiết bị khác bị hỏng dẫn đến thất bại trong việc thao tác hay khó khăn trong việc can thiệp vào mạch.

Thận trọng

Đảm bảo rằng các phụ kiện được kết nối phù hợp với hướng dẫn sử dụng của thiết bị. Cần kiểm soát và theo dõi cẩn thận.

Hướng dẫn sử dụng

1. Nhẹ nhàng vặn thiết bị ra bằng cách xoay tay cầm ngược chiều kim đồng hồ $\frac{1}{2}$ đến 1 vòng.
2. Lắp đoạn phía sau của dây dẫn vào mặt trước thiết bị và đặt thiết bị trên dây ở vị trí mong muốn.
3. Xoay tay cầm theo chiều kim đồng hồ cho đến khi gặp lực cản. Xoay tay cầm khi cần thiết để thao tác dây.
4. Đặt lại thiết bị nếu cần bằng cách làm theo các bước 1-3.

Hướng dẫn hủy bỏ

Sau khi sử dụng, hủy bỏ sản phẩm và bao bì theo chính sách của bệnh viện, cơ quan quản lý hay chính quyền địa phương.