

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Dung dịch khử khuẩn máy thận nhân tạo

Chủng loại: Tiutol® KF

Mã sản phẩm: 7120222

Mô tả sản phẩm

Dung dịch khử khuẩn máy thận nhân tạo (Tiutol® KF) là dung dịch đậm đặc chứa Natri hypochlorite với đặc tính làm sạch mạnh và đảm bảo tính khử khuẩn cao.

Phức hợp hoạt chất của Tiutol® KF đã đăng ký bảo hộ bao gồm chlorine hoạt động đã được ổn định cũng như những hoạt chất tạo thành phức hợp, và đặc biệt là có mùi chlorine thấp so với dung dịch chlorine hoạt động thông thường.

Được dùng để khử khuẩn nhiệt và làm sạch máy thận nhân tạo.

Có tác dụng trên vi khuẩn, TbB, nấm và virus (bao gồm HBV, HCV và HIV)

Đã được khảo nghiệm theo tiêu chuẩn EN 1040/EN 13727, EN 1275/13624, EN 14348, RKI 01.2004.

Quy cách đóng gói: can 5L

Mục đích sử dụng/Chỉ định

Dung dịch dùng để khử khuẩn máy thận nhân tạo.

Chống chỉ định

Hiện chưa có chống chỉ định đối với sản phẩm.

Hướng dẫn sử dụng

Tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất, nhà sản xuất có hướng dẫn bố trí khử khuẩn đối với máy và thùng chứa bằng bơm tỷ lệ.

Sau mỗi chu kỳ súc rửa, đơn vị lọc máu cần phải kiểm tra sự xem có chất khử khuẩn tồn dư không, sử dụng dung dịch alcoholic phenolphthalein 1%. Dung dịch thử phải không được có màu đỏ.

Nồng độ pha loãng	3%
Thời gian khử khuẩn máy chạy thận nhân tạo	15 phút (60 ⁰ C)

Thông tin

Độ tương thích vật liệu: Không phù hợp với vật liệu nhạy cảm với clo hoặc iốt.

Cảnh báo, Thận trọng

Không được trộn lẫn với acid hoặc các sản phẩm có chứa acid vì có thể giải phóng khí nguy hiểm (clo)!

Có thể ăn mòn kim loại. Gây bỏng da và tổn thương mắt nghiêm trọng.

Sử dụng găng tay bảo hộ/quần áo bảo hộ/thiết bị bảo vệ mắt/thiết bị bảo vệ khuôn mặt/bảo vệ tai.

NẾU NUỐT PHẢI: hãy rửa miệng. KHÔNG gây nôn.

NẾU ROI LÊN DA (hoặc tóc): Cởi tất cả quần áo bị nhiễm bẩn ngay lập tức. Rửa da bằng nước/vòi hoa sen.

NẾU ROI VÀO MẮT: Rửa một cách cẩn thận bằng nước trong vài phút. Tháo kính áp tròng nếu có và dễ thực hiện. Tiếp tục rửa. Liên hệ với TRUNG TÂM CHỐNG ĐỘC/bác sỹ ngay lập tức.

Dung dịch/ thùng chứa cần phải được loại bỏ tại nhà máy xử lý chất thải đã được phê duyệt.

Điều kiện bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, tránh ánh nắng mặt trời, nhiệt độ không quá 25°C