

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG


Tên sản phẩm: **Dây phụ kết nối dây truyền hóa chất nhiều cổng với chai truyền dịch**

Chủng loại: Cyto-Set® Line

Mã sản phẩm: A25811NF; A25812NF; A2581NF; A2582NF

Tổng quan

Cyto-Set® Line kết nối các dung dịch đã được môi. Thiết bị này chỉ có một đầu nhọn và một ống chuyển tiếp làm bằng polyurethane, kẹp và một màng giữ dịch, đuôi khí (2) (màng chặn dịch)

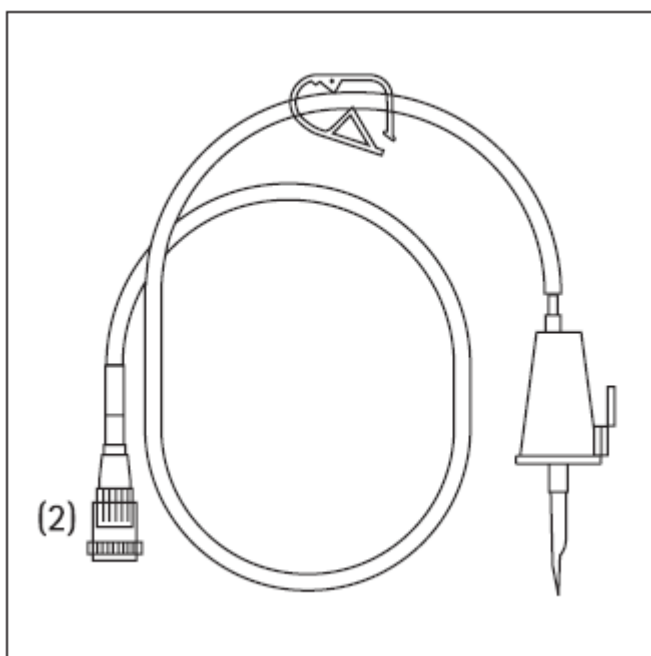

Chỉ định

Dùng truyền các loại thuốc gây độc tế bào qua kim luồn.

Chống chỉ định

Truyền các chế phẩm từ máu như hồng cầu, tiểu cầu.

Nguy cơ/Tác dụng phụ

Đối với bệnh nhân: nguy cơ thuyên tắc khí.

Người sử dụng và bên thứ ba: Bộ dây Cyto-Set® giảm nguy cơ nhiễm khuẩn với thuốc độc tế bào ở mức thấp nhất khi thao tác đúng.

Cảnh báo

Thông rửa bằng dung dịch trung tính trước khi truyền thuốc độc tế bào. Lặp lại quy trình thông rửa mỗi lần truyền một loại thuốc khác. Chú ý tới thông tin kê toa thuốc độc tế bào. Không tái tiệt khuẩn. Không phù hợp truyền các tế bào máu. Không sử dụng nếu bao bì bị

phá hủy. Không kết nối trực tiếp Cyto-Set® Line vào bệnh nhân nếu không sử dụng dây Cyto-Set® Infusion và dây Cyto-Set® Infusomat Space. Chỉ kết nối bộ kết nối vào hệ thống truyền dịch với màng chặn khí và chỉ cho thuốc độc tế bào. Không tháo rời bộ dây sau khi truyền thuốc độc tế bào. Loại bỏ hoàn toàn hệ thống gồm tất cả các dây, chai, và túi. Chú ý hướng dẫn sử dụng máy truyền dịch. Chú ý dùng loại dây phù hợp với máy truyền dịch. Tránh gây gập và xoắn dây.

Tái sử dụng thiết bị dùng một lần gây nguy cơ cao cho bệnh nhân và người sử dụng. Có thể gây ra nhiễm khuẩn và/ hoặc suy giảm chức năng. Nhiễm khuẩn và/ hoặc giới hạn chức năng của thiết bị có thể dẫn tới tổn thương, bệnh hoặc chết cho bệnh nhân.

Truyền các thuốc nhạy cảm với ánh sáng cần dây truyền dịch tránh ánh sáng. Luôn luôn kiểm tra, tương tác với thuốc khác hay vật liệu được thể hiện trong SPC (tóm tắt thông tin thuốc) của thuốc

Chú ý hướng dẫn sử dụng truyền dịch song song

Sử dụng khóa kẹp độc lập, tùy vào người sử dụng.

Khóa kẹp (đóng hay mở) không bị kiểm soát bởi máy truyền dịch.

Hướng dẫn sử dụng Cyto-Set® Line

- Cắm đầu nhọn vào chai dịch truyền: Đóng kẹp (1) cắm đầu nhọn vào chai.
- Khi sử dụng chai thủy tinh, mở van thông khí màu xanh (2)
- Mở khóa kẹp cho đến khi đuôi hết khí, sau đó đóng lại. Màng chặn dịch ngăn không cho thuốc rò rỉ ra bên ngoài (3)
- Kết nối Cyto-Set® Line với bộ dây Cyto-Set® Infusion hoặc bộ dây Cyto-Set® Infusomat Space

