

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CỦA SẢN PHẨM

(Tiếng Việt)

Tên sản phẩm: Bộ chuyên đổi lọc máu một kim PVC không chứa DEHP


Chủng loại: Single needle adapter DEHP-free PVC

Mã sản phẩm: 7211117

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Bộ chuyển đổi lọc máu một kim PVC không chứa DEHP - 7211117

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Bộ chuyển đổi lọc máu một kim PVC không chứa DEHP- 7211117

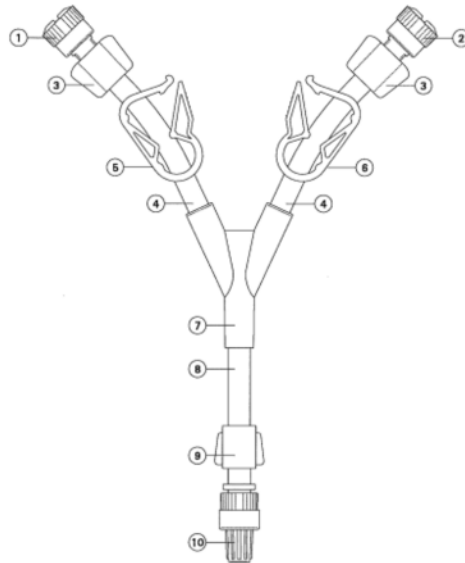

Số	Tên thành phần	Mô tả
1	Nắp đậy Khóa Luer cái màu đỏ	Nắp bảo vệ màu đỏ cho đầu nối Khóa Luer
2	Nắp đậy Khóa Luer cái màu xanh	Nắp bảo vệ màu xanh cho đầu nối Khóa Luer
3	Đầu nối LL cái	Đầu nối LL cái
4	Ống nhựa PVC không chứa DEHP	Ống dẫn máu chính
5	Kẹp nhỏ màu đỏ	Mở/ đóng kẹp
6	kẹp nhỏ màu xanh	Mở/ đóng kẹp
7	Đầu nối chữ "Y"	Đầu nối chữ "Y"
8	Ống nhựa PVC không chứa DEHP	Ống dẫn máu chính
9	Male luer lock xoay tự đẩy	Đầu nối (Đầu nối với Bệnh nhân) cho Bộ kim Fistula và bộ dây máu
10	Nắp thông hơi	Nắp thông hơi bảo vệ cho đầu nối với bệnh nhân

Tất cả các vật liệu đều tuân thủ các yêu cầu về độc tính tế bào, độ nhạy cảm, phản ứng trong da, độc tính toàn thân cấp tính và khả năng tương hợp máu.

Việc đánh giá khả năng tương thích sinh học của các hệ thống mạch ngoài cơ thể để chạy thận nhân tạo cho thấy sự phù hợp và an toàn của các vật liệu được sử dụng theo tiêu chuẩn ISO 10993.

TÊN SẢN PHẨM

Bộ chuyển đổi lọc máu một kim PVC không chứa DEHP

CHUNG LOẠI

Single needle adapter DEHP-free PVC

BẢO QUẢN

7211117 được tiệt trùng bằng tia gamma, thời hạn sử dụng 3 năm.

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VÀ CHỈ ĐỊNH

Bộ chuyển đổi lọc máu một kim PVC không chứa DEHP là thiết bị dùng một lần được sử dụng trong chạy thận nhân tạo.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Chống chỉ định đối với phương pháp điều trị chạy thận nhân tạo đã biết là quá mẫn với bất kỳ vật liệu nào được sử dụng và/hoặc có thể là tình trạng của bệnh nhân (các khía cạnh lâm sàng, bất thường đông máu không kiểm soát được, v.v.).

THẬN TRỌNG VÀ CẢNH BÁO

Thời gian tiếp xúc cơ thể bị hạn chế (= dưới 24 giờ), một đợt điều trị lọc máu thường kéo dài 4/6 giờ.