

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

## Chỉ thép khâu xương ức Steelex® Sternum Set

### Mô tả

Steelex® là chỉ khâu phẫu thuật vô trùng, không tiêu bằng thép không gỉ được cung cấp dưới dạng đa sợi xoắn hoặc sợi đơn.

Sternum Set là bộ chỉ phẫu thuật đặc biệt gồm dây thép không gỉ sợi đơn dùng để đóng xương ức.

Steelex®, Sternum Set đáp ứng mọi yêu cầu của Dược Điển Hoa Kỳ đối với chỉ vô trùng không tiêu.

### Chỉ định

Steelex® được chỉ định trong phẫu thuật ổ bụng, cho các thủ thuật nhãn khoa (phẫu thuật và buộc vòng gân), phẫu thuật thoát vị bẹn và đóng xương ức.

Sternum Set được chỉ định để đóng xương ức.

### Cơ chế hoạt động

Steelex® được sử dụng để khâu vết thương tạm thời.

Sternum Set được thiết kế để tồn tại được trong cơ thể bệnh nhân.

Sử dụng Steelex®, Sternum Set sẽ gây phản ứng viêm nhẹ, thường liên quan đến phản ứng sinh lý của cơ thể đối với dị vật. Theo thời gian, các sợi mô liên kết bao lấy lớp chỉ khâu.

### Chống chỉ định

Steelex®, Sternum Set bị chống chỉ định sử dụng ở các bệnh nhân dị ứng với các thành phần chính (mangan, niken, crôm hoặc molybden) hay thép không gỉ.

### Cảnh báo

Không tái sử dụng sản phẩm: Nguy cơ nhiễm trùng cho bệnh nhân và/hoặc người sử dụng và sự suy giảm chức năng của sản phẩm gây ra do tái sử dụng.

Nguy cơ chấn thương, bị bệnh hoặc tử vong do nhiễm bẩn và/hoặc suy giảm chức năng của sản phẩm.

Không yêu cầu các điều kiện bảo quản đặc biệt.

### Áp dụng

Việc sử dụng phải dựa trên yêu cầu phẫu thuật.

Người sử dụng phải có kinh nghiệm phẫu thuật khi sử dụng chỉ Steelex®, Sternum Set.

Khi thao tác với Steelex®, Sternum Set phải đặc biệt thận trọng để các dụng cụ phẫu thuật như kẹp forcep hay kẹp kim không làm đứt hay uốn cong.

### Tác dụng phụ

Có khả năng ăn mòn do tiếp xúc với kim loại khác.

**Lưu ý và chi tiết về độ ổn định**

Không được phép tái tiệt trùng Steelex®, Sternum Set.

Bao bì đã mở mà chưa sử dụng hoặc bị hư hỏng phải được tiêu hủy.

**Ngày thông tin:** 03/2011