

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

## Miếng vá mạch máu

### Chủng loại: Vascular-Patch

#### Mô tả

Vascular- Patch (Miếng vá mạch máu) là miếng vá vi xốp, tinh sợi được dùng cho phẫu thuật mạch máu.

Vascular- Patch được mô tả dung nạp vượt trội và hoàn toàn ổn định sinh học.

Thành phần: Vascular- Patch được làm từ polyester urethane béo, có độ tinh khiết cao và được khử trùng ETO.

#### Chỉ định

Can thiệp tái tạo trong

- Động mạch cảnh
- Động mạch, tĩnh mạch sâu
- Động mạch đùi
- Động mạch chậu

#### Cách thức hoạt động

Sau khi miếng vá được khâu vào thành mạch, khi bắt đầu cho dòng máu chảy, bề mặt trong của miếng vá được bao phủ bởi một lớp mỏng fibrin. Lớp fibrin này sau đó sẽ được thay thế dần dần bởi một màng nội mạc mới.

Màng nội mạc mới này bắt nguồn từ thành mạch còn nguyên vẹn, được đính chắc chắn vào bề mặt trong của miếng vá và không thể hiện bất kỳ xu hướng tăng sản nào.

Vascular- Patch được đặc trưng bởi độ phòng tốt và độ đàn hồi theo chiều dọc xuất sắc, có thể duy trì được chức năng trong nhiều năm.

Cấu trúc tinh sợi của Vascular- Patch loại bỏ hầu hết các trường hợp chảy máu ở đường khâu, mũi khâu trong cây ghép.

#### Chống chỉ định

- Cây ở khu vực có nguy cơ nhiễm trùng
- Thay thế thành tim
- Cây ở khu vực động mạch vành

#### Thận trọng

Xem mục Cách dùng

#### Tương tác với chất khác

Chưa biết

#### Cảnh báo

Không có

#### Cách dùng

Trước khi sử dụng Vascular- Patch, bác sĩ phẫu thuật nên làm quen trước với công nghệ phẫu thuật, các đặc tính và ứng dụng cụ thể của miếng vá. Bác sĩ phẫu thuật chọn kích cỡ Vascular-Patch thích hợp và cắt vật liệu đến kích cỡ phù hợp với chỉ định và điều kiện phẫu thuật.

Vascular- Patch không thấm máu và không yêu cầu xử lý trước ( Ví dụ: tiền đông vón) trước khi cấy ghép.

Sử dụng dụng cụ phẫu thuật sắc để cắt miếng vá đến kích cỡ yêu cầu. Miếng vá nên được khâu bằng kim bo tròn thân để tránh phá vỡ cấu trúc tinh sợi.

Khuyến khích sử dụng chỉ không tiêu 5.0 và 6.0 để khâu.

Nếu cần kẹp siết miếng vá, hàm của kẹp nên được đệm để tránh hư hại cấu trúc miếng vá.

#### Tác dụng phụ

Việc sử dụng miếng vá mạch máu có thể dẫn đến những tác dụng phụ được đề cập sau đây: tái hẹp mạch, nhiễm trùng và các phản ứng xung quanh nơi cấy ghép. Ngoài ra có thể bao gồm các tác dụng phụ khác.

### Hạn sử dụng

Nên cấy ghép Vascular- Patch ngay khi được mở bao bì và không sử dụng sau ngày hết hạn. Bảo quản Vascaular- Patch ở nhiệt độ  $25 \pm 5$  °C.

### Thông tin khác

Không tái khử trùng Vascular- Patch.





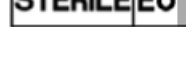





Không nên sử dụng Vascular- Patch khi bao bì bị hư hại.

### Thông tin sản phẩm

Miếng vá vô trùng: dày 0,45 mm

	Gói 1 miếng	Gói 2 miếng	Gói 5 miếng
Kích cỡ	REF	REF	REF
2 x 9 cm	1107330	1107267	1107275
1 x 7 cm	1107348	1107283	1107291
3 x 4 cm	1107356	1107321	1107305

### Ký hiệu sử dụng trong dán nhãn

	<b>Chỉ sử dụng một lần</b>
	<b>Hạn sử dụng</b>
	<b>Ngày sản xuất</b>
	Giới hạn nhiệt độ
	Vô trùng trừ khi bao bì bị mở hoặc hư hại. Phương pháp khử trùng: Oxy Ethylene
	CE- nhãn hiệu và mã số của bộ phận được dán nhãn. Sản phẩm phù hợp với các yêu cầu cần thiết của Hướng dẫn dụng cụ y tế 93/42/EEC
	Số lô
	<b>Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng</b>
	Số catalogue
	Kích cỡ
<b>Ngày ban hành thông tin: 7/2015</b>	