

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. CHỈ ĐỊNH:

Túi dán đựng nước tiểu vô trùng được sử dụng trong nhi khoa cho các trường hợp: trẻ em tiểu nhiều lần (tiểu dầm), các trường hợp cần lấy tiểu xét nghiệm sinh hóa, tế bào, vi khuẩn


2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Chú ý lựa chọn túi phù hợp với trọng lượng của trẻ
- Rửa tay thật sạch
- Đặt trẻ nằm ngửa, hai chân co lên.
- Làm sạch da bằng nước và xà phòng trung tính (dung dịch khử khuẩn chỉ được sử dụng khi có chỉ định của bác sĩ). Sau đó lau khô. Không sử dụng các loại phấn bột hay chất bôi trơn.
- Tháo bỏ lớp giấy ở giữa của miếng dán.
- Cần thận tháo lớp giấy bảo vệ ra khỏi chất kết dính.
- Dán túi xung quanh dương vật của trẻ sơ sinh hoặc âm hộ. Đảm bảo rằng tất cả các cạnh đều được dán kín (hình 1).

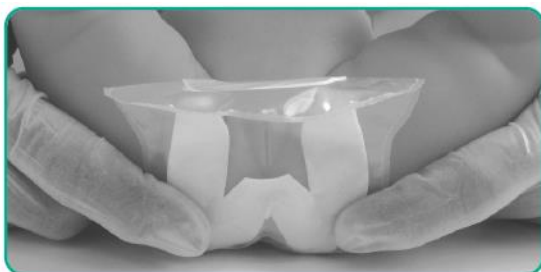

Hình 1

- Đối với túi có ống xả: đóng kín van xả trước khi dán túi lên da. Các lỗ van trên túi được thiết kế đặc biệt cho việc :
 - Lấy mẫu trực tiếp bằng ống tiêm (hình a)
 - Kết nối được với tất cả các loại đầu ống (hình b)

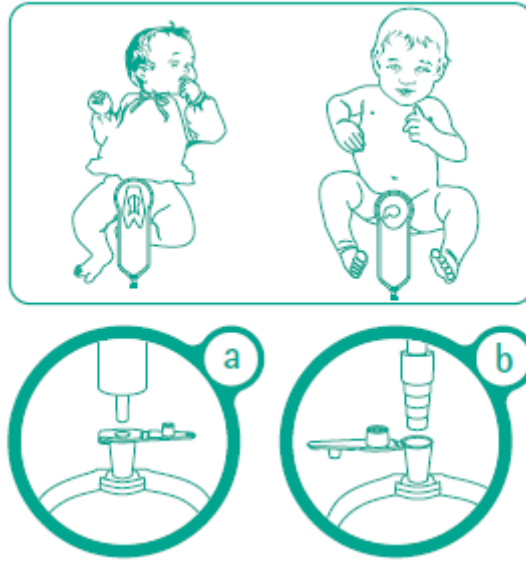

- Để tháo, nhẹ nhàng nhắc một góc lên và tháo ra
- Để bảo vệ mẫu nước tiểu, dán mép ngay sau khi tháo ra, dán băng keo bảo vệ nếu cần.
- Trong trường hợp xét nghiệm sinh hóa, tế bào học và xét nghiệm sinh học, không nên dùng túi đựng đã lưu quá 30 phút . Ngay cả khi túi đựng không có gì, bạn cũng nên thay túi. Gửi nước tiểu đến phòng thí nghiệm phân tích trong vòng 2 giờ sau khi thu thập. Mẫu nước tiểu được bảo quản tối đa trong tủ lạnh 12 giờ. Ghi rõ thời gian lấy nước tiểu lên túi đựng.
- Trong hội chứng tiểu dầm, thay túi khi cần thiết ví dụ: túi bị thủng, túi bị đóng cặn bẩn.

3. CẢNH BÁO/ THẬN TRỌNG

- Túi nước tiểu chỉ được sử dụng một lần duy nhất, việc tái sử dụng sẽ dễ dẫn đến nguy cơ nhiễm khuẩn chéo cho bệnh nhân và người sử dụng hoặc ảnh hưởng đến chức năng tiểu của bệnh nhân.
- Không sử dụng sản phẩm nếu bao bì sản phẩm đã bị mở hoặc bị rách.