

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tên sản phẩm: **Bơm kim tiêm**

Chủng loại: Omnican®

## Chỉ định

Bơm kim tiêm dùng một lần để tiêm insulin dưới da.

## Chống chỉ định

Không có

## Biện pháp phòng ngừa

- Sử dụng sản phẩm theo quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn tiêu chuẩn của quốc gia / tổ chức.
- Không được đậy lại nắp kim tiêm một khi đã tháo bỏ nắp bảo vệ.
- Không được sử dụng nếu đã hết hạn.
- Vứt bỏ các bơm kim tiêm đã qua sử dụng trong hộp đựng kim theo hướng dẫn của quốc gia / tổ chức.
- Thương tích bất ngờ do bị kim tiêm nhiễm bẩn đâm phải có thể gây bệnh truyền nhiễm.

## Cảnh báo

- Không sử dụng nếu bao bì bị hở hoặc rách.
- Không được khử trùng lại.
- Chỉ sử dụng một lần.
- Tái sử dụng thiết bị chỉ dùng một lần có thể gây rủi ro cho bệnh nhân hay người dùng. Việc tái sử dụng có thể gây nhiễm bẩn và / hoặc suy giảm chức năng của thiết bị.
- Nhiễm bẩn và / hoặc hạn chế chức năng thiết bị có thể làm cho bệnh nhân bị thương tích, bệnh tật hay tử vong.
- Bơm kim tiêm Omnican® có chia cấp độ cho các nồng độ insulin cụ thể. Không được sử dụng các ống tiêm với nồng độ insulin khác vì điều này có thể dẫn đến quá liều hoặc thiếu liều.

## Hướng dẫn sử dụng:

### Sử dụng kỹ thuật vô trùng

Sử dụng sản phẩm theo các quy định tiêu chuẩn về phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn.

1. a) Bao bì dạng vỉ nhựa đơn: Tháo bỏ ống tiêm khỏi bao bì.


b) Túi nhựa: Tháo bỏ nắp bảo vệ.

2. Tháo bỏ nắp bọc kim tiêm mà không dốc ngược để tránh tiếp xúc với mũi nhọn của kim tiêm.

Chuẩn bị ống tiêm để tiêm theo các quy trình đã được quy định.

3. Thực hiện tiêm dưới da theo các quy trình đã được quy định.

4. Vứt bỏ ngay bơm kim tiêm đã qua sử dụng trong hộp đựng kim tiêm được quy định theo các quy trình tiêu chuẩn tại cơ sở của quý vị và / hoặc theo các quy định về xử lý kim tiêm được áp dụng ở quốc gia của quý vị.

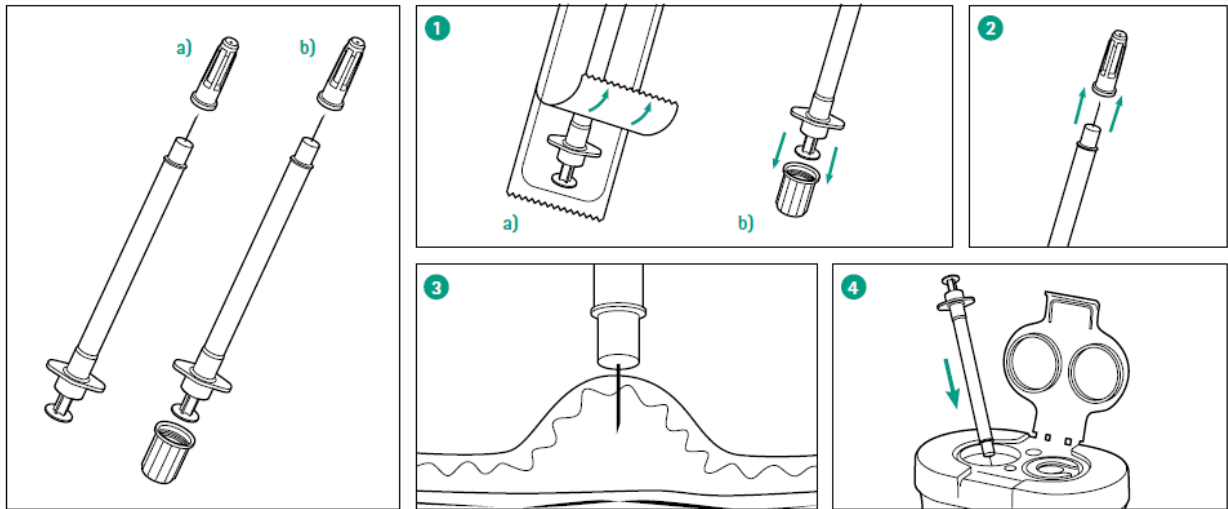

### Sản phẩm sử dụng tại nhà

Vui lòng không ra một quyết định nào liên quan đến vấn đề y khoa trước khi tham khảo ý kiến nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị.