

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tên sản phẩm: **Lưỡi chích lấy máu**
Chủng loại: **Solofix®**

Chỉ định

Lưỡi chích dùng để lấy máu mao mạch từ bệnh nhân

Chống chỉ định

Chưa xác định

Biện pháp phòng ngừa

- Sử dụng sản phẩm theo quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn tiêu chuẩn của quốc gia, tổ chức.
- Dùng kỹ thuật vô trùng theo hướng dẫn của quốc gia/tổ chức.
- Thải bỏ kim tiêm theo hướng dẫn của quốc gia/tổ chức.
- Thương tích bất ngờ do bị kim tiêm nhiễm bẩn đâm phải có thể gây bệnh truyền nhiễm

Cảnh báo

- Không sử dụng nếu bao bì bị hỏng
- Không khử trùng lại.
- Tái sử dụng thiết bị chỉ dùng một lần có thể gây rủi ro cho bệnh nhân hay người dùng. Việc tái sử dụng có thể gây nhiễm bẩn và/hoặc suy giảm chức năng của thiết bị.
- Nhiễm bẩn và/hoặc hạn chế chức năng thiết bị có thể làm cho bệnh nhân bị thương tích, bệnh tật hay tử vong.

Hướng dẫn sử dụng

Thu thập mẫu máu được thực hiện theo các bước sau:

1. Đầu tiên lau sạch vị trí đâm kim. Bóc phần giấy dán để mở bì đựng một lưỡi chích lấy máu **Solofix®** và cầm ở phần trên sản phẩm (tức là không chạm vào đầu nhọn của lưỡi chích).
2. Chích vào vị trí đâm kim đã làm sạch trên ngón tay, dải tai hoặc gót chân để vào mao mạch. Độ sâu của đâm kim tùy thuộc vào lực mà người sử dụng.
3. Lấy mẫu máu bằng ống mao mạch trực tiếp nhỏ lên một que thử - tùy theo loại xét nghiệm quý vị đang thực hiện – và tiến hành quy trình phân tích.
4. Sau đó thải bỏ lưỡi chích đã sử dụng trong vật đựng thích hợp.

Sản phẩm sử dụng tại nhà

Vui lòng không ra một quyết định nào liên quan đến vấn đề y khoa trước khi tham khảo ý kiến nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị.