

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tên sản phẩm: **Dung dịch khử khuẩn bề mặt thiết bị y tế mức độ trung bình**

Chủng loại: Meliseptol® Rapid

Mã sản phẩm: 18565; 18567

### Thành phần

100g dung dịch chứa: Propan-1-ol 50.0g, Didecyldimethylammonium chloride 0.075 g; Lauramine Oxide 30% (kl/kl) 0.20 g; Perfume Oil Oxygen D20229AT, PM 0.05 g; Nước tinh khiết vừa đủ 100 g.

### Mục đích sử dụng/ Chỉ định

Dung dịch khử khuẩn Meliseptol® Rapid có chứa cồn được dùng để khử khuẩn nhanh các bề mặt thiết bị y tế như ghế khám, giường bệnh, thiết bị trong phòng phẫu thuật...

Sản phẩm được sử dụng như bước cuối cùng của quy trình khử khuẩn trang thiết bị y tế; sau đó sẽ không khử khuẩn hoặc tiệt khuẩn trang thiết bị y tế.

### Hiệu lực diệt khuẩn

Sản phẩm có hiệu lực diệt các loại:

- Vi khuẩn, vi khuẩn lao, nấm men.
- Các virus có vỏ bọc bao gồm cả HBV, HCV, HIV
- Các virus không có vỏ bọc bao gồm cả Polyomavirus

### Hướng dẫn sử dụng

- Rót Meliseptol® Rapid đậm đặc, không pha loãng từ chai lên khăn lau dùng một lần và lau ướt hoàn toàn các bề mặt. Một cách khác là xịt lên các bề mặt khó tiếp cận cho đến khi thấm ướt hoàn toàn và thấm đều bằng khăn lau dùng một lần - để dung dịch hoạt động trong 1 phút.
- Giữ bề mặt ướt cho đến khi hết thời gian tiếp xúc.
- Để bề mặt trang thiết bị y tế khô tự nhiên, không dùng khăn lau khô.
- Bề mặt trang thiết bị y tế đã được khử khuẩn và sẵn sàng sử dụng.
- Nếu khử khuẩn các thiết bị điện, phải tắt chúng (rút phích cắm điện) và để nguội trước khi khử khuẩn. Nếu không thể tắt, phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo rằng không có sự chuyển đổi nào xảy ra trong khi tiến hành khử khuẩn.
- Trước khi sử dụng, hãy kiểm tra độ nhạy cảm với cồn của các vật liệu để đánh giá khả năng tương thích với Meliseptol® Rapid.

### Thời gian tiếp xúc

Phổ tác dụng	Thời gian tiếp xúc
Vi khuẩn, nấm men (EN 1276, 13727, 13624, 13697, 16615, EN 14562), vi khuẩn lao (EN 14348), một số virus (bao gồm HBV, HCV, HIV) (EN 14476)	1 phút
Polyomavirus (DVV/RKI)	5 phút

### Chống chỉ định

Không sử dụng cho các thiết bị xâm lấn.

### Cảnh báo, thận trọng

- Sản phẩm không tương thích với kính nhựa (acrylic glass) và các vật liệu nhạy cảm với cồn.
- Sản phẩm là chất lỏng dễ cháy, nguy cơ gây tổn thương mắt nghiêm trọng. Có thể gây buồn ngủ hoặc chóng mặt.
- Để sản phẩm tránh xa nguồn nhiệt, bề mặt nóng, tia lửa, ngọn lửa trần và các nguồn bắt lửa khác. Không hút thuốc.
- Tránh hít hơi.
- Đeo mắt kính bảo hộ
- Nếu vào mắt: Rửa cẩn thận bằng nước trong vài phút. Tháo bỏ kính áp tròng (nếu có và dễ dàng lấy ra). Tiếp tục rửa với nước. Gọi ngay Trung tâm chống độc hoặc Bác sĩ.
- Thải bỏ dung dịch, vỏ chai/can đến nơi xử lý chất thải đã được phê duyệt tại địa phương.
- Tránh xa tầm tay trẻ em.

### **Bảo quản**

Bảo quản ở nhiệt độ không quá 25°C. Giữ xa nguồn lửa.

Độ ổn định của sản phẩm không bị ảnh hưởng sau nhiều lần mở nắp hoặc dùng đồ đựng màu/không màu.

### **Hạn sử dụng**

5 năm kể từ ngày sản xuất

### **Quy cách đóng gói lưu hành**

Chai nhựa dạng xịt 1000ml (mã sản phẩm: 18565)

Can nhựa 05 lít (mã sản phẩm: 18567)