


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Dụng cụ pha thuốc Mini-Spike® 2

Chỉ định

Mini-Spike® 2 có thể được sử dụng để hút hoặc bơm đôi với các loại ống chứa thuốc một liều hoặc nhiều liều.

Cách sử dụng

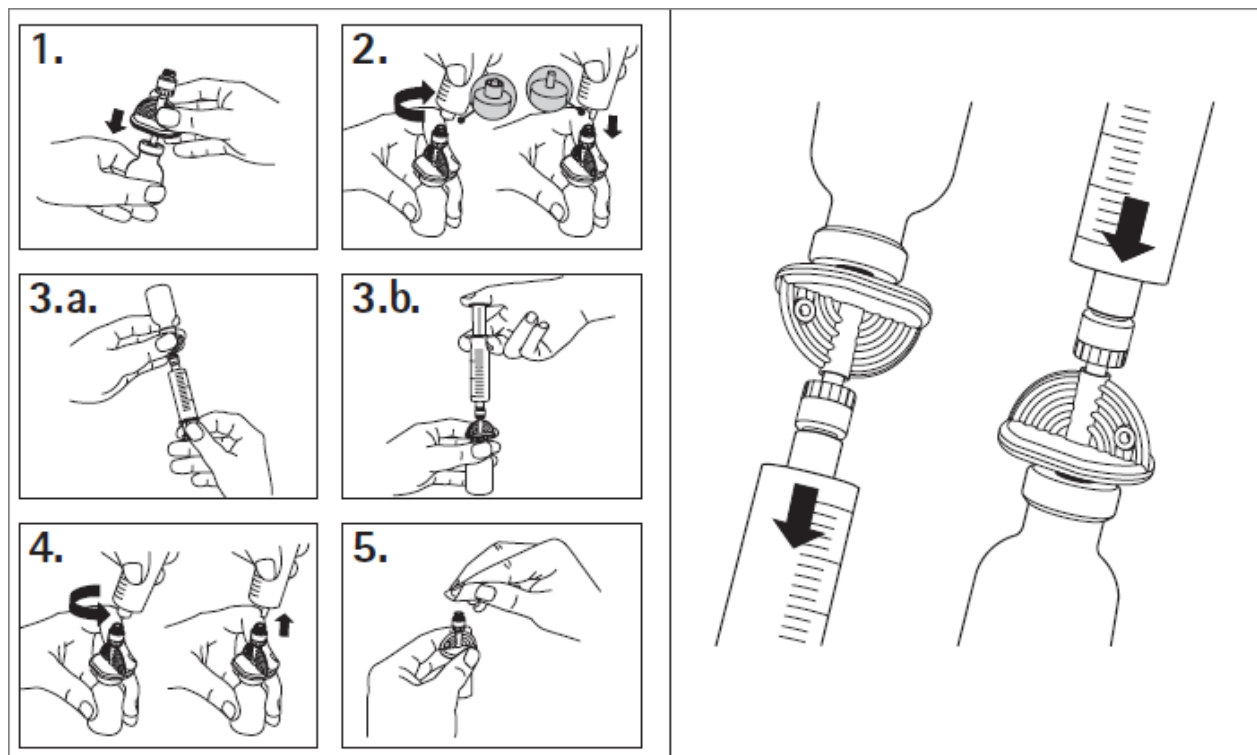

Sử dụng Mini-Spike® 2 với tay và/hoặc găng tay đã được khử trùng.

Tháo nắp bảo vệ khỏi ống thuốc và khử trùng nắp đậy theo quy trình cơ sở.

Tháo nắp bảo vệ khỏi kim.

1. Đâm kim vào ống thuốc bằng cách giữ phần cầm nắm của Mini-Spike® 2. Không được động vào đầu nối luer. Khử trùng trước khi dùng theo quy trình cơ sở.

2. Nối xi-lanh vào đầu nối luer của Mini-Spike® 2 với ống thuốc đặt thẳng đứng.

3 a. Dốc ống thuốc ngược xuống để hút dung dịch.

b. Dốc ống thuốc thẳng đứng lại để bơm dịch.

4. Tháo xi-lanh.

5. Khử trùng đầu nối luer theo quy trình được thiết lập.

Lưu ý

Không bao giờ bơm thuốc khi ống thuốc đang ở vị trí quay ngược xuống dưới. Làm như vậy sẽ gây hỏng phần lọc khí và giảm khả năng thoát khí. Ống thuốc phải được để thẳng đứng khi bơm dung dịch từ xi-lanh vào.

Khi phải hút nhiều dung dịch từ lọ nhiều liều:

khử trùng đầu nối luer của Mini-Spike® 2 theo quy trình được thiết lập. Lọ đã cắm Mini-Spike® 2 phải được để thẳng đứng.

Vật liệu được sử dụng

Phân cầm nắm: SAN

Kim đâm: SAN/ABS

Van luer : PC + SI

Tấm lọc: acrylic copolymer trên thân làm bằng nylon

Thời gian sử dụng

Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng của thuốc cũng như các quy định hiện hành về vệ sinh và an toàn.

Cảnh báo

Tái sử dụng thiết bị dùng một lần duy nhất sẽ gây nguy cơ tiềm ẩn cho bệnh nhân hoặc người sử dụng. Việc này có thể dẫn đến nhiễm bẩn và/hoặc hư hỏng chức năng hoạt động. Sự nhiễm bẩn và/hoặc hạn chế chức năng của thiết bị có thể khiến bệnh nhân bị tổn thương, đau ốm hoặc tử vong.

Sự tách lọc

Vì khả năng hấp thụ có thể lên đến >15%, không dùng kim với các loại lọc chất lỏng/lọc hạt (lọc khí có thể không quan trọng) đối với các loại thuốc: corticotropin, cosyntropin, cyanocobalamin, ergonovines, maleates, glucagon, insulin, vasopressin. Chưa có thông tin về tương tác với các thuốc khác ngoài các thuốc đã được liệt kê ở trên.

Một số chất gây nứt gãy

Một số loại chất và dung môi vô cơ, hoạt động bề mặt như macrogol (polyethylene glycol) và/hoặc benzyl alcohol, trong thuốc hoặc các hoạt chất, có thể gây ra hiện tượng căng và gãy ở nhựa. Đối với những chất có đặc tính mạnh này, chúng tôi khuyến cáo chỉ sử dụng kim một lần để hút.

Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm đối với hậu quả có thể xảy ra do sử dụng không đúng quy định.

Chủng loại sản phẩm

	A	B	C	*
Mini-Spike® 2 (Ref. 4550590 + 4550590-04)	✓			xanh lá
Mini-Spike® 2 Filter (Ref. 4550591 + 4550591-04)	✓		✓	xanh lơ
Mini-Spike® 2 Chemo (Ref. 4550592 + 4550592-04)		✓	✓	đỏ

* Màu của van Luer

A. Màn lọc khí cỡ 0.45 µm

Bảo vệ thuốc khỏi bị nhiễm khuẩn.

B. Màn lọc khí cỡ 0.2 µm

Bảo vệ thuốc khỏi bị nhiễm khuẩn.

Bảo vệ người dùng khỏi nhiễm bẩn từ hơi khí.

Chuyên dùng cho các chất có độc tính.

C: Màn lọc chất lỏng / Màn lọc tiểu phân cỡ 5 µm

Bảo vệ khỏi nhiễm bẩn dạng hạt.

Chuyên dùng đối với các loại thuốc dạng bột.