

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tên sản phẩm: **Bột pha dung dịch khử khuẩn thiết bị y tế mức độ cao**

Chủng loại: **Stabimed® ultra**

Mã sản phẩm: **19812**

Thành phần

Natri percarbonate (sản phẩm phức hợp giữa Natri carbonate và hydro peroxide (2: 3)) 30-50% (kl/kl).

Thành phần hoạt tính: axit peracetic 0,16 % (pha loãng trong nước 10 g/l).

Tá dược: Axit Citric, Natri carbonate, chất hoạt động bề mặt.

Chỉ định

Khử khuẩn và làm sạch dụng cụ phẫu thuật, dụng cụ nội soi cứng và mềm, dụng cụ gây mê. Thích hợp để làm sạch bằng sóng siêu âm.

Khử khuẩn bước cuối cho dụng cụ không chịu nhiệt như ống nội soi mềm.

Hướng dẫn sử dụng

Trước khi sử dụng: Đeo găng tay và mặc quần áo bảo hộ, làm theo các khuyến nghị của nhà sản xuất.

Làm sạch các dụng cụ trước và sau khi sử dụng với chất tẩy rửa phù hợp, ví dụ: Helizyme.

Các bước sử dụng:

1. Đổ nước vào thùng chứa
2. Đổ bột vào thùng với liều lượng được đo lường theo nồng độ xác định

Ví dụ:

Cốc đo liều	Stabimed® Ultra	Dung dịch sử dụng
~25ml	20g	1 L / 2%
~50ml	40g	2 L / 2%
~75ml	60g	3 L / 2%
~150ml	120g	6 L / 2%
~200ml	160g	8 L / 2%

3. Trộn đều đến khi bột hòa tan vào dung dịch (khoảng 10 phút)
4. Ngâm các dụng cụ cần khử khuẩn vào trong thùng chứa dung dịch đã pha trong thời gian 10 phút.
5. Dung dịch được loại bỏ sau 24 giờ hoặc khi nhìn thấy những vết bẩn
Dụng cụ sau khi làm sạch được rửa lại bằng nước khử ion, để khô và có thể sử dụng ngay.

Hiệu quả tiêu diệt vi khuẩn của sản phẩm Stabimed® ultra:

Vi sinh vật	Các tiêu chuẩn	Nồng độ/ thời gian
Làm sạch và khử khuẩn các dụng cụ chịu nhiệt và không chịu nhiệt. Hiệu quả tiêu diệt vi khuẩn, vi khuẩn lao, nấm, vi-rút, bào tử	DGHM/VAH 2001 EN 13727, EN 13624 EN 14348, EN 14561 EN 14562, EN 14563 EN 14476, EN 13704	2.0% / 10 phút 1.5%/ 15 phút
Nấm (<i>A. brasiliensis</i>)	DGHM/VAH 2001 EN 14562	2.0%/15 phút

*Theo VAH-Statement 4/2007

Cảnh báo, thận trọng

- Để sản phẩm tránh xa nguồn nhiệt, bề mặt nóng, tia lửa, ngọn lửa trần và các nguồn bắt lửa khác. Không hút thuốc.
- Tránh hít hơi. Đeo găng tay/quần áo bảo vệ/kính bảo vệ mắt/mặt nạ.
- Nếu nuốt phải: Gọi Trung tâm chống độc hoặc Bác sĩ nếu bạn cảm thấy không khỏe.
- Nếu vào mắt: Rửa cẩn thận bằng nước trong vài phút. Tháo bỏ kính áp tròng (nếu có) để dễ tiến hành. Tiếp tục xả.
- Tránh xa tầm tay trẻ em.

Bảo quản

Bảo quản nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 25°C.

Quy cách đóng gói

- Chai nhựa 800 g (mã sản phẩm: 19812)