

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

**Tên sản phẩm:** Bộ dây truyền dịch dùng cho máy

**Chủng loại:** Infusomat® Space Line; Infusomat® Space Line SafeSet

### Chỉ định

Dùng để truyền dịch thông thường và truyền các dung dịch dinh dưỡng ngoài đường tiêu hóa (v.d: các Dung dịch dinh dưỡng ngoài đường tiêu hóa và Lipid)

### Chống chỉ định

Không dùng cho: dung dịch dinh dưỡng đường ruột, thuốc nhạy cảm với ánh sáng, máu và chế phẩm máu.

### Cảnh báo

Tái sử dụng các trang thiết bị y tế dùng một lần có thể dẫn đến rủi ro tiềm tàng cho bệnh nhân và người sử dụng. Có thể dẫn đến phơi nhiễm hoặc suy giảm khả năng hoạt động, dẫn đến thương tật hoặc tử vong cho bệnh nhân.

Sản phẩm tiệt trùng, không chứa chất gây sốt. Không sử dụng nếu nắp bảo vệ bị lỏng, mất hoặc nếu bao bì đóng gói bị hư hỏng.

Chú ý! Nếu dùng garo khí nén trong quá trình truyền, trước đó hãy xả khí trong garo. Tuân thủ các biện pháp an toàn chung! Vui lòng đọc Hướng dẫn sử dụng của Bơm truyền B. Braun và truyền song song. Khi sử dụng Infusomat® Space mà không sử dụng cảm biến nhỏ giọt, thì phải cài đặt thể tích truyền nhỏ hơn hoặc bằng thể tích dịch trong ống đong. Nếu sử dụng Infusomat® Space Line loại dây NEUTRAPUR vui lòng chọn chế độ cài đặt là “Space Line NEUTRAPUR”.

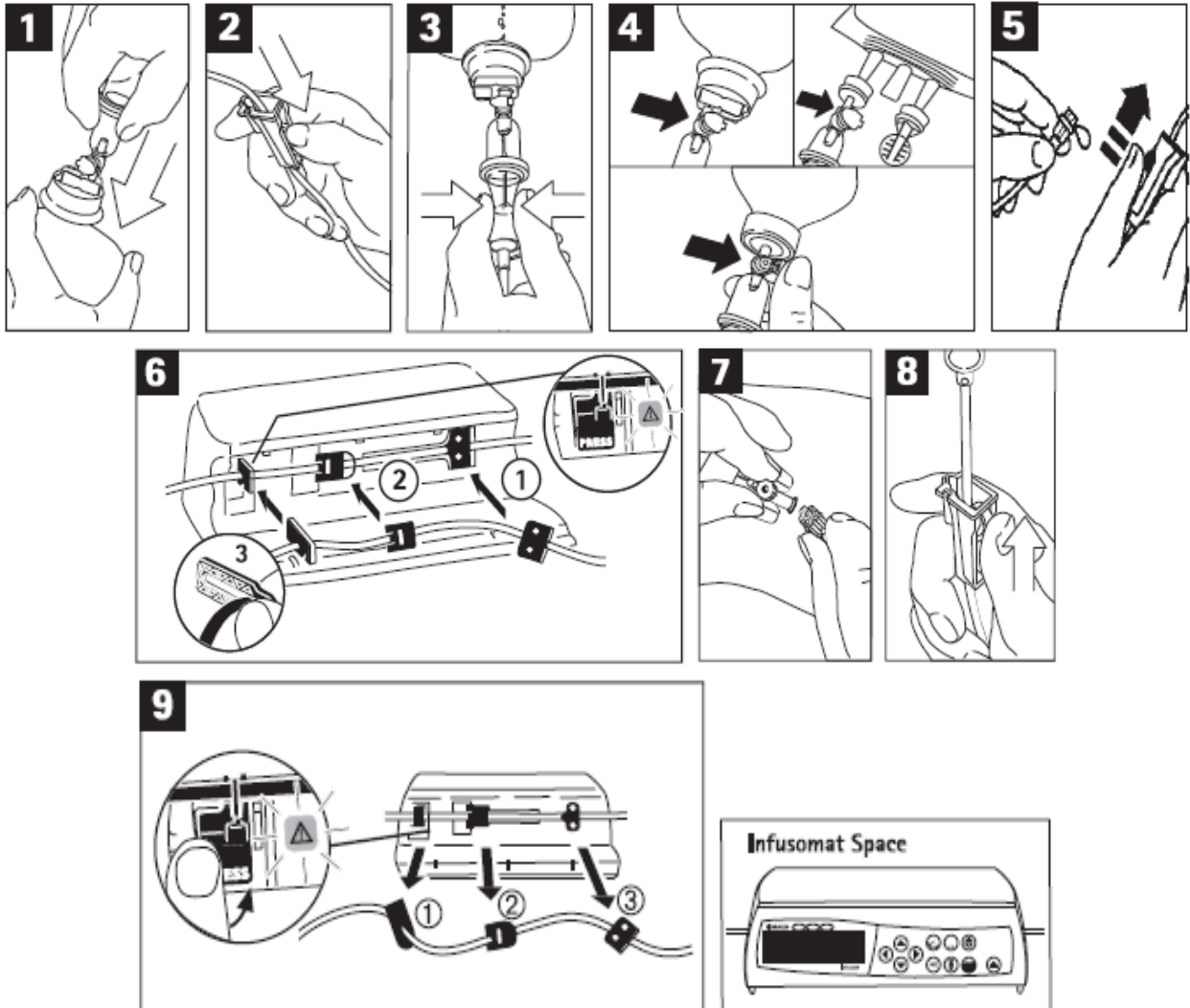
### Các bước sử dụng

Khi sử dụng bộ dây truyền dịch với máy Infusomat® Space, thực hiện theo đúng các bước sau:

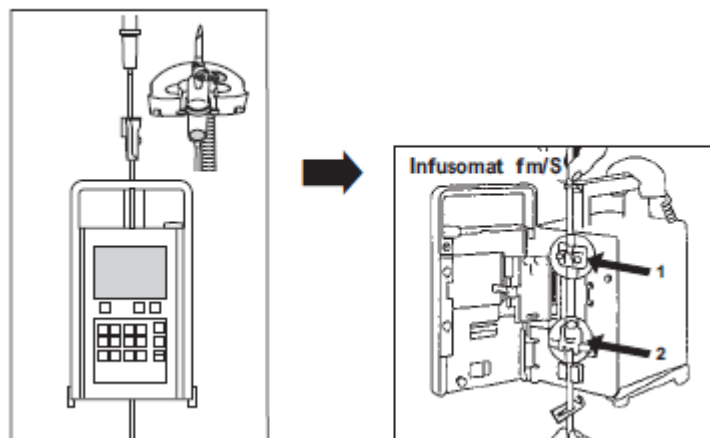
- 1) Đâm đầu nhọn vào chai thuốc/hóa chất.
- 2) Khóa kín khóa chính giọt.
- 3) Mồi dịch vào bầu đếm giọt.
- 4) Không mở van thông khí nếu sử dụng với chai/túi thuốc/hóa chất bằng nhựa. Chỉ mở van thông khí nếu sử dụng với chai thủy tinh.
- 5) Mở khóa chính giọt để đuổi khí.
- 6) Lắp bộ dây truyền vào máy bơm từ phải sang trái. Chú ý các vị trí đánh số.
- 7) Kết nối với đường truyền vào người bệnh.
- 8) Mở hoàn toàn khóa chính giọt.
- 9) Để tháo bộ dây truyền, nhấn nút ở vị trí số 1 như hình minh họa và tháo bộ dây truyền dịch theo chiều từ trái sang phải. Chú ý các vị trí đánh số.

Lưu ý: Khi sử dụng bộ dây truyền dịch với máy Infusomat® fmS, thực hiện việc lắp bộ dây truyền vào máy theo chiều từ trên xuống, chú ý các vị trí đánh số.




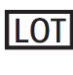




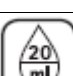

Hình ảnh mô tả các bước sử dụng:



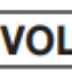

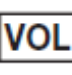






**P** = Pressure (Druck)



## Chú thích ý nghĩa của các biểu tượng

	Không sử dụng lại
	Thận trọng
	Tham khảo hướng dẫn sử dụng
	Số lô
	Tiệt trùng
	Hạn sử dụng
	Ngày sản xuất
	Không chứa PVC
	Giọt trên ml
	Vị trí tiêm, dùng kim

	Không chứa DEHP
	Không chứa cao su tự nhiên
	Không sử dụng nếu bao bì không nguyên vẹn
	Dung tích nạp/lưu trữ trên một mét chiều dài ống
	Chiều dài ống dây (cm)
	Thể tích lưu trữ trên mỗi mét chiều dài ống dây
	Không gây sốt
	Màng chặn khí
	Màng lọc dịch 15μm
	Vị trí tiêm, không dùng kim

**Chủ sở hữu sản phẩm:** B. Braun Melsungen AG, Đức

**Cơ sở sản xuất:**

1. B. Braun Melsungen AG  
Địa chỉ: Carl-Braun-Straße 1, 34212 Melsungen, Đức
2. B. Braun Medical SAS  
Địa chỉ: 13 rue Croix la Comtesse, 28400 Nogent-le-Rotrou, Pháp
3. B. Braun Medical Kft Production Division  
Địa chỉ: Déli-Külhatár út 2-4, 3200 Gyöngyös, Hungary
4. B. Braun Medical Industries Sdn. Bhd.  
Địa chỉ: Bayan Lepas Free Industrial Zone, 11900 Penang, Malaysia