

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tên sản phẩm: **Bộ dây truyền dịch dùng cho máy, loại dùng trong điều trị ung thư**

Chủng loại: Infusomat® Plus Line SafeSet

Chỉ định

Dùng để truyền các loại dịch truyền thông thường, dịch truyền ít hòa tan và dung dịch gây độc tế bào.

Chống chỉ định

Không dùng cho: máu và chế phẩm máu, hỗn dịch lipid, thuốc nhạy cảm với ánh sáng, dung dịch dinh dưỡng đường ruột.

Cảnh báo

Sản phẩm sử dụng một lần. Tái sử dụng thiết bị dùng một lần duy nhất sẽ gây nguy cơ tiềm ẩn cho bệnh nhân hoặc người sử dụng. Việc này có thể dẫn đến nhiễm khuẩn và/hoặc hạn chế chức năng hoạt động. Sự nhiễm khuẩn và/hoặc hạn chế chức năng hoạt động của thiết bị có thể khiến bệnh nhân bị tổn thương, đau ốm hoặc tử vong.

Sản phẩm tiệt trùng, không chứa chất gây sốt. Không sử dụng nếu nắp bảo vệ bị lỏng, bị mất hoặc nếu bao bì đóng gói bị hư hỏng.

Chú ý: Nếu dùng garo khí nén trong quá trình truyền, trước đó hãy xả khí trong garo. Tuân thủ các biện pháp an toàn chung.


Vui lòng đọc Hướng dẫn sử dụng của Bơm truyền B. Braun và hướng dẫn chung về truyền song song. Khi dùng bơm Infusomat® compact plus, cần cài đặt lượng truyền nhỏ hơn hoặc bằng với lượng dịch của chai dịch truyền. Danh sách đầy đủ các loại bơm phù hợp sẽ được cung cấp khi có yêu cầu.

Các bước sử dụng

Khi sử dụng bộ dây truyền dịch với máy Infusomat® compact plus, thực hiện theo đúng các bước sau:

- 1) Đóng khóa chỉnh giọt
- 2) Đâm đầu nhọn của dây truyền dịch vào túi đựng máu theo phương vuông góc 90 độ
- 3) Mồi một lượng dịch vào bầu đếm giọt
- 4) Mở van thông khí nếu chai dịch truyền làm bằng thủy tinh. Đóng van thông khí nếu chai dịch truyền là chai nhựa tự xẹp đều
- 5) Tiến hành đuổi khí ra khỏi đường truyền
- 6) Lắp đoạn dây Silicone vào máy, lưu ý vị trí của các khóa trên dây phải phù hợp với máy. Tránh tình trạng xoắn dây.
- 7) Lắp phần dây truyền vào hai đường dẫn ở hai bên máy,
- 8) Đóng phần nắp máy, lưu ý không để phần nắp máy kẹp vào dây có thể gây ra hỏng dây.
- 9) Kết nối dây truyền vào đường truyền đến bệnh nhân
- 10) Mở khóa chỉnh giọt để tiến hành truyền
- 11) Đóng khóa chỉnh giọt khi kết thúc quá trình truyền
- 12) Tháo dây truyền ra khỏi đường truyền đến bệnh nhân.
- 13) Tháo dây truyền dịch ra khỏi máy.

Hình ảnh mô tả các bước sử dụng:

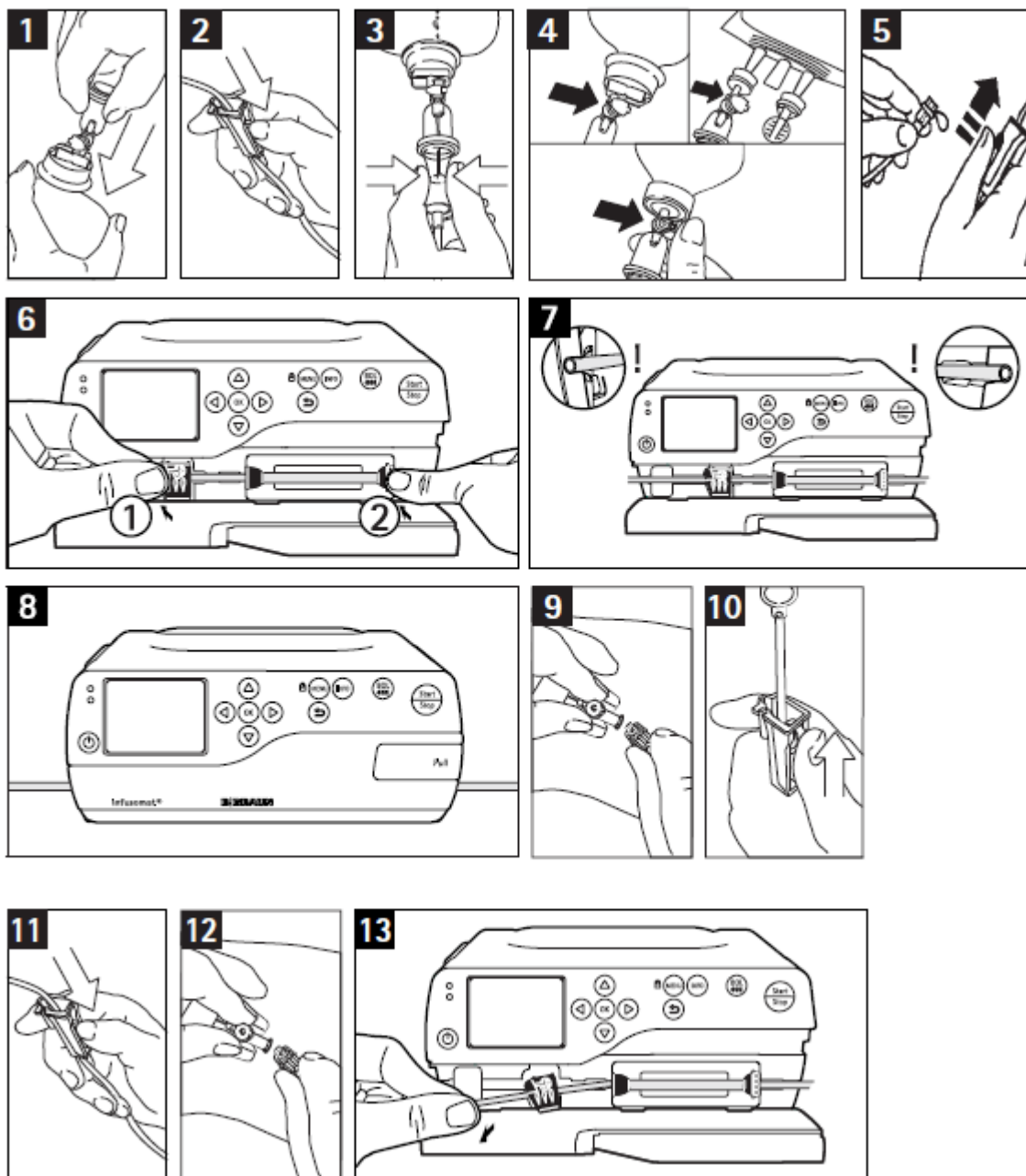

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM
Trưởng phòng đăng ký
(Xác nhận bằng chữ ký số)