

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

## Que thử nồng độ axit peracetic

Chủng loại: Serim<sup>®</sup> GUARDIAN<sup>™</sup> (Peracetic Acid Test Strips)

### Chỉ định

Que thử nồng độ axit peracetic Serim<sup>®</sup> GUARDIAN<sup>™</sup> (Peracetic Acid Test Strips) (mã sản phẩm 5106) dùng thử hiệu lực của axit peracetic trong quá trình tái xử lý quả lọc thận nhân tạo bằng Renalin<sup>®</sup> Cold Sterilant, PerAldecide<sup>™</sup>, Puristeril<sup>®</sup> 340, Peracidin<sup>™</sup> và Micro-X.

### Chống chỉ định

Không sử dụng kết quả thay đổi màu sắc của Que thử nồng độ axit peracetic Serim<sup>®</sup> GUARDIAN<sup>™</sup> (Peracetic Acid Test Strips) sau 10 giây từ khi lấy que thử ra khỏi mẫu. Không sử dụng que thử với các chất oxy hóa mạnh khác ở nồng độ đủ có thể gây sai kết quả dương tính, tức là clo ở khoảng 800 ppm. Chất khử chằng hạn như axit ascorbic có thể gây ra âm tính giả.

### Cảnh báo và thận trọng

- Que thử nồng độ axit peracetic Serim<sup>®</sup> GUARDIAN<sup>™</sup> (Peracetic Acid Test Strips) chỉ dùng để thử hiệu lực của axit peracetic trong dung dịch xử lý quả lọc. Để thử chất tồn dư, sử dụng que thử tồn dư peroxide Serim<sup>®</sup> GUARDIAN<sup>™</sup> (Residual Peroxide Test Strips) (mã sản phẩm 5105).
- Luôn luôn thử trước khi tráng quả lọc.
- Bảo quản que thử chưa sử dụng trong hộp nguyên bản.
- Giữ nguyên chất chống ẩm.
- Đóng chặt nắp hộp ngay sau khi lấy que thử, que thử phải luôn được bảo quản tránh ẩm.
- Không chạm vào đầu có chất chỉ thị.
- Không để đầu có chất chỉ thị tiếp xúc với dung dịch hoặc bề mặt có khả năng chứa các chất gây nhiễu.
- Không để hộp đựng que thử hoặc que thử nằm trên máy thận nhân tạo vì nhiệt độ có thể làm giảm khả năng hoạt động của que thử.

### Các bước sử dụng

1. Trước khi tráng màng lọc, lấy mẫu từ dung dịch khử khuẩn axit peracetic từ nắp quả lọc đủ để nhúng đầu chứa chỉ thị của que thử (không pha loãng mẫu thử).
2. Nhúng đầu chỉ thị của que thử vào mẫu 1 giây rồi lấy ra.
3. Vẫy ngay que thử để hết dịch thử còn bám lại.
4. Ngay lúc 10 giây sau khi lấy que thử ra khỏi mẫu thử, quan sát đầu chỉ thị và đọc theo hướng dẫn đọc KẾT QUẢ sau đây.
5. Đổ mẫu thử còn lại vào thùng chứa phù hợp và thay nắp đậy của quả lọc.

**Lưu ý:** Không sử dụng một mẫu thử cho nhiều hơn 2 que thử. Que thử chỉ sử dụng 1 lần. Sau 10 giây, không sử dụng kết quả sau 10 giây từ khi lấy que thử ra khỏi mẫu thử.

**Bảo quản**

- Que thử nồng độ axit peracetic Serim<sup>®</sup> GUARDIAN<sup>™</sup> (Peracetic Acid Test Strips) phải được bảo quản trong hộp nguyên bản với nắp đậy chặt.
- Không rút bỏ chất chống ẩm.
- Bảo quản ở nhiệt độ 15°C - 30°C.
- Không sử dụng que thử đã hết hạn.
- Số lô và hạn sử dụng được in dưới đáy hộp.

**CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM**  
**Trưởng phòng đăng ký**

**Lê Thị Hương**