

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tên sản phẩm: Thước đo áp lực tĩnh mạch trung tâm

Chủng loại: Medifix®

Mã sản phẩm: 4279913

Mục đích sử dụng: Dùng đo áp lực tĩnh mạch trung tâm (CVP) và chỉ dùng cho truyền dịch bằng trọng lực.

Cách sử dụng:

1. Lấy thang đo và kẹp ra khỏi bao gói và gắn kẹp vào thang đo.
2. Cố định thang đo vào cây treo truyền dịch vừa tầm với bệnh nhân.
3. Điều chỉnh điểm đánh dấu mức trung tính tạm thời về dưới điểm chuẩn bằng cách dịch chuyển thang đo chia vạch.
4. Treo ống đo của hệ thống Medifix® và đưa phần dây tương ứng vào rãnh của thang đo theo hướng từ trên xuống.
5. Để tinh chỉnh điểm trung tính, chỉnh thang đo về lại vị trí điểm chuẩn.
6. Vật chỉ thị phải ở vị trí nằm ngang.

Hình ảnh mô tả các bước sử dụng:



