

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tên trang thiết bị y tế: **Khăn lau khử khuẩn bề mặt thiết bị y tế mức độ trung bình**

Chủng loại: Meliseptol® Wipes Sensitive 100

Mã sản phẩm: 19894

Thành phần

Túi 100 khăn lau được tẩm 600g dung dịch Meliseptol® Foam Pure. 100g dung dịch Meliseptol® Foam Pure chứa: 17g Propan-1-ol, 0,23g Didecylmethylamoni clorua. Tá dược: < 5% các chất hoạt động bề mặt không ion, nước tinh khiết.

Mục đích sử dụng/ Chỉ định

Khăn lau Meliseptol® Wipes Sensitive 100 sử dụng để khử khuẩn cho trang thiết bị y tế với bề mặt nhạy cảm như: thiết bị siêu âm, máy bơm truyền dịch, màn hình, ghế nha sĩ, giường da nhân tạo...

Sản phẩm được sử dụng như bước cuối cùng của quy trình khử khuẩn trang thiết bị y tế; sau đó sẽ không khử khuẩn hoặc tiệt khuẩn trang thiết bị y tế.

Hiệu lực diệt khuẩn

Sản phẩm có hiệu lực diệt các loại:

- Vi khuẩn, nấm men, vi khuẩn lao
- Các virus có vỏ bọc bao gồm cả HBV, HCV, HIV
- Các virus không có vỏ bọc bao gồm cả Polyomavirus, Norovirus, và Rotavirus

Các bước sử dụng

1. Sát khuẩn tay và mang găng tay trước khi sử dụng.
2. Thiết bị điện phải được tắt trước khi khử khuẩn. Nếu không thể tắt, phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo rằng không có sự chuyển đổi nào xảy ra trong khi tiến hành khử khuẩn. Để nguội các bề mặt nóng trước khi khử khuẩn.
3. Lau sạch tất cả các bề mặt với khăn lau Meliseptol® Wipes Sensitive 100 và để khô. Chờ cho đến khi đủ thời gian tiếp xúc!
4. Bề mặt được làm sạch và khử khuẩn trong một bước.
5. Trong trường hợp nhiễm bẩn có thể nhìn thấy, qui trình phải được thực hiện theo hai bước:
 - a) Đầu tiên chất bẩn được loại bỏ bằng khăn lau Meliseptol® Wipes Sensitive 100.
 - b) Khử khuẩn sau đó được thực hiện với khăn lau Meliseptol® Wipes Sensitive 100 mới.
6. Xử lý khăn lau theo đúng hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn.
7. Trước khi sử dụng lại, để bề mặt khô hoàn toàn.

Thời gian tiếp xúc

Phổ hoạt tính	Thời gian tiếp xúc
Vi khuẩn, nấm men (EN 1276, EN 13727, EN 13624, EN 16615, EN14562), virus có vỏ bọc (bao gồm HBV, HCV, HIV) (EN 14476, RKI/DVV), Rotavirus (DVV/RKI)	1 phút
Vi khuẩn lao (EN 14348, EN 14563)	3 phút
Polyomavirus (DVV/RKI), Norovirus (MNV)	5 phút

Cảnh báo, thận trọng

- Sản phẩm dễ cháy, dễ bay hơi. Sản phẩm có thể gây tổn thương mắt nghiêm trọng.
 - Để sản phẩm tránh xa nguồn nhiệt, bề mặt nóng, tia lửa, ngọn lửa trần và các nguồn bắt lửa khác. Không hút thuốc.
 - Không hít hơi. Đeo găng tay/ quần áo bảo hộ/ bảo vệ mắt/ mặt nạ.
 - Nếu hít phải: Đưa nạn nhân sang khu vực không khí trong lành và giữ cho nạn nhân dễ thở.
 - Nếu nhiễm vào mắt: Rửa kỹ bằng nước sạch trong vài phút. Tháo bỏ kính áp tròng (nếu có) để dễ dàng tiến hành. Tiếp tục rửa. Gọi cho Trung tâm chống độc hoặc bác sĩ nếu bạn cảm thấy không khỏe.
 - Thải bỏ khăn lau, vỏ chai/can đến nơi xử lý chất thải đã được phê duyệt tại địa phương.
- Lưu ý:** Không sử dụng trên bề mặt nóng hoặc thiết bị điện đã được bật! Không dùng cho các thiết bị xâm lấn.
Tránh xa tầm tay trẻ em.

Điều kiện bảo quản

Bảo quản ở nhiệt độ không quá 25°C.

Hạn sử dụng

2 năm kể từ ngày sản xuất.
Hạn sử dụng sau khi mở nắp: 03 tháng.

Quy cách đóng gói

Túi 100 khăn.