

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tên sản phẩm: **Khóa ba ngã chống nứt gãy**

Chủng loại: Discifix® C

Mã sản phẩm: 16700C; 16701C; 16720C; 16740C; 16751C; 16760C.

Chỉ định

Sử dụng để kết nối các đường truyền trong:

- Liệu pháp truyền dịch
- Truyền lipid trong liệu pháp dinh dưỡng ngoài đường tiêu hóa
- Gây mê bằng thuốc mê đường tĩnh mạch, ví dụ: Propofol
- Hóa trị liệu với các chất ức chế sự phát triển của tế bào
- Truyền các chất ức chế tế bào trong liệu pháp miễn dịch, ví dụ: Cyclosporin
- Truyền các thuốc an thần trong liệu pháp điều trị thần kinh, ví dụ: Phenytoin natri.

Chống chỉ định

Hiện chưa có chống chỉ định đối với sản phẩm.

Các bước sử dụng

1. Kết nối Discifix® C.
2. Xoắn chặt.
3. Khi vào đúng vị trí, khóa đầu xoay 360° trên trục của sản phẩm. Dụng cụ được thiết kế dễ dàng thao tác và không gây nguy cơ ngắt kết nối đường truyền.
Đầu khóa xoay của Discifix® C với mỗi khật xoay 45°, thiết kế mang lợi ích tối ưu đặc biệt phù hợp với bệnh nhân lưu động.
 - Đầu khóa xoay hạn chế được nguy cơ ngắt kết nối đường truyền khi bệnh nhân di chuyển.
 - Mỗi khật xoay 45° giúp xác định chính xác vị trí và tăng sự an toàn khi sử dụng khóa ba ngã.
4. Thiết kế đầu khóa xoay giúp kết nối thuận tiện khi thao tác tiêm hoặc hút trong tiêm truyền.
5. Thiết kế khật xoay 45° đảm bảo độ chính xác và dễ dàng sử dụng khóa ba ngã.
Trong hệ thống truyền phức hợp yêu cầu cần dùng nhiều hơn 1 khóa ba ngã, có thể sử dụng bộ manifolds để kết hợp các dịch truyền khác nhau và thiết lập hệ thống truyền mới.

Cảnh báo

Tái sử dụng thiết bị sử dụng một lần gây nguy cơ cao cho bệnh nhân và người sử dụng. Nó có thể dẫn tới nhiễm khuẩn và/ hoặc suy giảm chức năng. Nhiễm khuẩn và/ hoặc giới hạn các chức năng của thiết bị có thể dẫn đến tổn thương, bệnh hoặc chết cho bệnh nhân.

Không sử dụng nếu bao bì bị phá hủy.

Không tái khử trùng.